

คู่มือการใช้งาน

ชื่อเครื่องมือแพทย์ : คอนเนคเตอร์ ทิวปี (ท่อเชื่อม)

คำอธิบายเครื่องมือแพทย์ : ใช้ในการเชื่อมต่อถุงทวารเทียมสำหรับระบบทางเดินปัสสาวะไปยังถุงเก็บปัสสาวะ

วัตถุประสงค์การใช้งาน : ท่อเชื่อมที่ใช้ในการเชื่อมต่อถุงทวารเทียมสำหรับระบบทางเดินปัสสาวะไปยังถุงเก็บปัสสาวะ

1. ขั้นตอนการใช้งาน

(1) เสียบหัวต่อ

- เสียบหัวต่อของถุงเก็บปัสสาวะเข้ากับท่อเชื่อมทางด้านปลายท่อ

(2) เสียบท่อเชื่อม

- นำท่อเชื่อมเสียบกับถุงทวารเทียมที่ถอดเฉพาะฝาครอบออกให้แน่นจนกว่าจะมีเสียง "คลิก"

(3) ถอดท่อเชื่อม

- เมื่อถอดท่อเชื่อม กดส่วนที่เป็นห่วงลงไว้และดึงท่อเชื่อมออก



2. ข้อควรระวังในการใช้งาน

- ไม่ควรใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์การใช้งาน
- ควรใช้ตามคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ทวารเทียมที่จะใช้กับผลิตภัณฑ์นี้

3. เงื่อนไขการเก็บรักษา

- ไม่ควรเก็บในที่ที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูง
- ไม่ควรเก็บในที่ที่มีอุณหภูมิต่ำ (เช่น ตู้เย็น)
- ไม่ควรเก็บในที่ที่มีแสงแดดส่องถึง
- ไม่ควรเก็บเป็นเวลานาน

4. เครื่องหมาย (สัญลักษณ์)

SYMBOLS	
	Expiry Date ... (1)
	Lot number ... (2)

(1) วันหมดอายุ : ห้ามใช้งานหากเกินวันหมดอายุนี้

(2) ลีตการผลิต : เลขที่แสดงครั้งที่ผลิต

=====
[ข้อมูลผู้นำเข้า]

ผู้นำเข้า : บริษัท มารูเบน (ประเทศไทย) จำกัด (สาขากรุงเทพฯ ของบริษัท มารูเบน คอร์ปอเรชั่น จำกัด)

ที่อยู่ : 130-132 ชั้น 10-11 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10330 ประเทศไทย

โทร : 02256 6900
=====

- อ่านคู่มือการใช้งานนี้และทำความเข้าใจคุณสมบัติของสินค้าให้ดีก่อนใช้งาน
- โปรดเก็บคู่มือการใช้งานนี้ไว้ในบริเวณที่หยิบได้ง่ายตลอดเวลาเพื่อใช้อ้างอิงได้ตามความจำเป็น