

# คู่มือการใช้งาน

ชื่อเครื่องมือแพทย์ : โพรแคร์ 1

คำอธิบายเครื่องมือแพทย์ : อุปกรณ์ทวารเทียมชนิดชิ้นเดียว

วัตถุประสงค์การใช้งาน : กักเก็บสิ่งขับถ่าย (อุจจาระหรือปัสสาวะ) จากทวารเทียมไว้ชั่วคราว

## 1. ขั้นตอนการใช้งาน

### (1) การเตรียม

[เช็ดบริเวณรอบทวารเทียมให้สะอาด]

- 1) ทำให้ผ้าก๊อชเปียกชื้นและถูสบู่ให้เกิดฟองเพียงพอ
- 2) ใช้ผ้าก๊อชขำต้นเช็ดบริเวณรอบทวารเทียมให้สะอาดเรียบร้อย
- 3) ใช้ผ้าก๊อชแผ่นใหม่ที่ได้แช่ในน้ำอุ่นล้างสบู่ออกให้เรียบร้อย
- 4) ทิ้งไว้ให้แห้งเอง

\*ไม่ควรใช้เครื่องเป่าผมเนื่องจากทวารเทียมมีความละเอียดอ่อนต่อการกระตุ้นจากลมร้อนของเครื่องเป่าผม

### (2) วิธีติดพรี คัท

#### 1) เลือกอุปกรณ์โดยวัดขนาดทวารเทียม

- เลือกอุปกรณ์ที่มีขนาดพอดีกับขนาดทวารเทียมโดยใช้สเกลที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์

\*ขนาดทวารเทียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

\*ควรวัดขนาดอย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน

\*ควรรู้ขนาดทวารเทียมที่ถูกต้องไว้เสมอ

#### 2) ลอกแผ่นฟิล์มออก

- ลอกแผ่นฟิล์มออกจากแป้น
- ลอกปลายแผ่นฟิล์มของเทปกาวออกเล็กน้อย

#### 3) ติดให้ตรงกับทวารเทียม

- เช็ดตำแหน่งทวารเทียมและติดแป้นโดยต้องระมัดระวังไม่ให้แป้นคลาดเคลื่อนจากทวารเทียม

#### 4) ติดส่วนที่เป็นเทปกาว

- สอดนิ้วเข้าไปในช่องระหว่างถุงและส่วนที่เป็นกาว และลอกแผ่นฟิล์มของเทปกาวออก
- ติดอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้ย่น

#### 5) กดทับส่วนที่เป็นกาวให้แนบสนิทกับผิวหนัง

- กดทับบริเวณรอบทวารเทียมและเทปกาวให้ดีเพื่อที่จะติดแป้นที่ผิวหนังให้แนบสนิท

#### 6) มีทริงค์ เบลท์เพื่อใช้ยึดอุปกรณ์ให้มั่นคงขึ้นด้วย

- สามารถใช้ทริงค์ เบลท์ประกอบในการยึดอุปกรณ์ให้แน่นขึ้นได้ตามความจำเป็น

### (3) กรณีที่ทวารเทียมมีลักษณะเรียบหรือยุบ

- แนะนำให้ใช้ < โพรแคร์ 1-ดีซี > หรือ < โพรแคร์ 1-ยูซี >

#### (4) ตัวกรองกลิ่นที่ระบายแก๊สได้

- 1) ตัวกรองกลิ่นนี้จะสามารถค่อย ๆ ระบายแก๊สที่ถูกสะสมภายในถุงทวารเทียมออกได้
- 2) นำซีลปิดครอบตัวกรองที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ไปติดครอบตัวกรองเพื่อปิดรูที่อากาศผ่านเพื่อที่จะทำให้มีแก๊สถูกสะสมภายในถุงทวารเทียม  
เมื่อแก๊สถูกสะสมภายในถุงทวารเทียมแล้ว ลอกซีลออกและใช้มือกดถุงทวารเทียมเบา ๆ เพื่อระบายแก๊ส

#### (5) วิธีใช้คลิปและวิธีการอุจจาระ

##### [วิธีใช้คลิป]

- 1) เปิดคลิปโดยกดสตอปเปอร์ (ส่วนที่เกี่ยว) ไว้และดึงขึ้น  
เมื่อเปิดคลิปแล้วควรระมัดระวังไม่ให้ส่วนที่เป็นจุดพับบิดงอ
- 2) พันถุงทวารเทียมกับแขนของคลิป (ส่วนที่ดึงขึ้น) 1 รอบ  
หันคลิปให้ส่วนโค้งของคลิปเข้ากับร่างกาย
- 3) กดสตอปเปอร์ไว้และปิดคลิป  
สุดท้ายตรวจสอบคลิปว่าปิดสนิทอยู่หรือไม่

##### [วิธีการอุจจาระ]

- 1) ถอดคลิปโดยกดสตอปเปอร์และดึงคลิปลง
- 2) พับปลายถุงทวารเทียมขึ้นไว้ด้านนอกและระบายอุจจาระออก  
\*ป้องกันไม่ให้มือเปื้อนและกลิ่นเหม็นรั่วออกได้เนื่องจากปลายถุงทวารเทียมไม่สัมผัสกับอุจจาระ
- 3) ดึงปลายถุงทวารเทียมที่พับขึ้นไว้ลงมาให้เป็นสภาพเดิมและปิดคลิป

#### (6) วิธีใช้ท่อเชื่อม

- 1) ใช้ท่อเชื่อมในกรณีที่ต้องการใช้ถุงเก็บปัสสาวะ  
เสียบหัวต่อของถุงเก็บปัสสาวะเข้ากับท่อเชื่อมทางด้านปลายท่อ
- 2) นำท่อเชื่อมเสียบกับถุงทวารเทียมที่ถอดเฉพาะฝาครอบออกให้แน่นจนกว่าจะมีเสียง "คลิก"
- 3) เมื่อถอดท่อเชื่อม กดส่วนที่เป็นห่วงลงไว้และดึงท่อเชื่อมออก


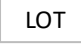
## 2. ข้อควรระวังในการใช้งาน

- ไม่ควรหาจำพวกยาซีผึ้งบริเวณรอบทวารเทียม ซึ่งอาจทำให้ประสิทธิภาพในการติดแน่นของแป้นลดลงได้
- ไม่ควรพับอุปกรณ์ขณะติดอยู่กับทวารเทียม
- ไม่ควรติดไว้ต่อเนื่องมากกว่าหนึ่งอาทิตย์
- ไม่ควรนำอุปกรณ์ที่ลอกออกมาครั้งหนึ่งแล้วไปติดซ้ำอีกครั้ง
- ไม่ควรใช้มือที่จับน้ำมันสัมผัสกับพื้นผิวด้านที่มีกาว
- ต้องไม่ทำให้อุปกรณ์เสียหายด้วยเล็บหรือของแข็งต่าง ๆ
- ไม่ควรฝืนดึงทวารเทียมมากเกินไป
- ไม่ควรเปลี่ยนอุปกรณ์ทันทีหลังอาบน้ำ
  - \*อาจลอกออกยากเนื่องจากประสิทธิภาพในการติดแน่นเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิของแป้นที่สูงขึ้น
  - \*หลังอาบน้ำควรทิ้งไว้อย่างน้อย 30 นาที จากนั้นเช็คว่าอุณหภูมิของแป้นได้ลดลงหรือไม่แล้วค่อยเปลี่ยนอุปกรณ์
- หากพื้นผิวด้านที่มีกาวของแป้นเย็นอาจทำให้แป้นติดไม่แน่นเท่าที่ควร  
กรณีเช่นนี้ควรย้ายไปห้องที่อุ่นและทำให้ทั่วบริเวณของแป้นอุ่นขึ้นก่อนใช้งาน
- รูที่ตัดบนแป้นนั้นต้อง ไม่เกินเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใช้งานได้ตามที่กำหนดไว้
- หากใช้งานแล้ว ไม่ถูกกับผิวหนังควรเลิกใช้งานและปรึกษาแพทย์หรือพยาบาล

## 3. เงื่อนไขการเก็บรักษา

- ไม่ควรเก็บในที่ที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูง
- ไม่ควรเก็บในที่ที่มีอุณหภูมิต่ำ (เช่น ตู้เย็น)
- ไม่ควรเก็บในที่ที่มีแสงแดดส่องถึง
- ไม่ควรเก็บในที่ที่ถูกกดทับ
- ไม่ควรเก็บเป็นเวลานาน
- ไม่ควรเก็บในสภาพที่แผ่นฟิล์มของแป้นถูกลอกออก

#### 4. เครื่องหมาย (สัญลักษณ์)

SYMBOLS	
	Expiry Date ... (1)
	Lot number ... (2)

(1) วันหมดอายุ : ห้ามใช้งานหากเกินวันหมดอายุนี้

(2) ลีตการการผลิต : เลขที่แสดงครั้งที่ผลิต

=====

#### [ข้อมูลผู้นำเข้า]

ผู้นำเข้า : บริษัท มารูเบน (ประเทศไทย) จำกัด (สาขากรุงเทพฯ ของบริษัท มารูเบน คอร์ปอเรชั่น จำกัด)

ที่อยู่ : 130-132 ชั้น 10-11 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  
10330 ประเทศไทย

โทร : 02256 6900

=====

- อ่านคู่มือการใช้งานนี้และทำความเข้าใจคุณสมบัติของสินค้าให้ดีขึ้นก่อนใช้งาน
- โปรดเก็บคู่มือการใช้งานนี้ไว้ในบริเวณที่หยิบได้ง่ายตลอดเวลาเพื่อใช้อ้างอิงได้ตามความจำเป็น