

คู่มือการใช้งาน

ชื่อเครื่องมือแพทย์: โพรแคร์ 2

คำอธิบายเครื่องมือแพทย์: อุปกรณ์ทวารเทียมชนิด 2 ชั้น

วัตถุประสงค์การใช้งาน: กักเก็บสิ่งขับถ่าย (อุจจาระหรือปัสสาวะ) จากทวารเทียมไว้ชั่วคราว

1. ขั้นตอนการใช้งาน

(1) วิธีติด <โพรแคร์ 2-เอฟ> <โพรแคร์ 2-เอฟเอ> (ฟรี คัท)

1) เช็ดบริเวณรอบทวารเทียมให้สะอาด

- ทำให้ผ้าก๊อชเปียกชื้นและถูสบู่ให้เกิดฟองเพียงพอ
- ใช้ผ้าก๊อชขจัดต้นเช็ดบริเวณรอบทวารเทียมให้สะอาดเรียบร้อย
- ใช้ผ้าก๊อชแผ่นใหม่ที่ได้แช่ในน้ำอุ่นล้างสบู่ออกให้เรียบร้อย
- ทิ้งไว้ให้แห้งเอง

*ไม่ควรใช้เครื่องเป่าผมเนื่องจากทวารเทียมมีความละเอียดอ่อนต่อการกระตุ้นจากลมร้อนของเครื่องเป่าผม

2) ตัดรูที่แผ่นคัตติงเกลจ

- วัดขนาดทวารเทียม
- ตัดรูที่แผ่นคัตติงเกลจให้มีขนาดเท่าทวารเทียม
- ตัดรูตรงกลางของแผ่นคัตติงเกลจ

3) ตัดรูบนแป้น

- พลิกแผ่นคัตติงเกลจที่ได้ตัดรูให้กลับด้านและนำไปวางทับกับแป้นด้านที่มีแผ่นฟิล์ม (เซพพาราเรเตอร์) ติดอยู่
 - ชิดเส้นบนแป้นตามขนาดรูของแผ่นคัตติงเกลจ
 - ตัดรูบนแป้นโดยให้มีขนาดรูใหญ่กว่าเส้นขีดดังกล่าวประมาณ 1-2 mm
- *ใช้นิ้วถูรอยตัดของแป้นให้เรียบเพื่อไม่ให้ทวารเทียมเป็นรอย

4) ลอกแผ่นฟิล์มออก (เซพพาราเรเตอร์)

- ลอกแผ่นฟิล์มออกจากแป้น (เซพพาราเรเตอร์)
- ในตอนนี้ ห้ามลอกฟิล์มออกแผ่นฟิล์มของเทปกาว
- ในตอนนี้ ห้ามลอกฟิล์มออกแผ่นฟิล์มของเทปกาว (สินค้า : โพรแคร์ 2-เอฟเอ)

5) ติดให้ตรงกับทวารเทียม

- ให้รูที่ตัดตรงกับทวารเทียม
- ติดแป้นโดยให้ส่วนที่จับของแผ่นประกบอยู่ในทิศทางซ้าย-ขวา

6) ติดส่วนที่เป็นเทปกาว (สินค้า : โพรแคร์ 2-เอฟเอ)

- สอดนิ้วเข้าไปในช่องระหว่างถุงและส่วนที่เป็นกาว และลอกแผ่นฟิล์มของเทปกาวออก
- ติดอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้ย่น

7) กัดทับส่วนที่เป็นกาวยให้แนบสนิทกับผิวหนัง

- กัดทับบริเวณรอบทวารเทียมและเทปกาวให้ดีเพื่อที่จะติดแป้นที่ผิวหนังให้แนบสนิท

(2) วิธีติด < โพรแครร์ 2-เอฟซี > (ฟรี คัท)

1) เช็ดบริเวณรอบทวารเทียมให้สะอาด

- ทำให้ผ้าก๊อชเปียกชื้นและถูสบู่ให้เกิดฟองเพียงพอ
- ใช้ผ้าก๊อชขจัดต้นเช็ดบริเวณรอบทวารเทียมให้สะอาดเรียบร้อย
- ใช้ผ้าก๊อชผืนใหม่ที่ได้แช่ในน้ำอุ่นล้างสบู่ออกให้เรียบร้อย
- ทิ้งไว้ให้แห้งเอง

*ไม่ควรใช้เครื่องเป่าผมเนื่องจากทวารเทียมมีความละเอียดอ่อนต่อการกระตุ้นจากลมร้อนของเครื่องเป่าผม

2) ลอกแผ่นฟิล์มออก (เซพพาทเรเตอร์)

- ลอกแผ่นฟิล์มออกจากแป้น (เซพพาทเรเตอร์)
- ในตอนนี้ ห้ามลอกฟิล์มออกแผ่นฟิล์มของเทปกาว

3) ติดให้ตรงกับทวารเทียม

- ติดแป้นให้ตรงกับทวารเทียมโดยให้ส่วนที่จับของแผ่นประกบอยู่ในทิศทางซ้าย-ขวา

4) ติดส่วนที่เป็นเทปกาว

- สอดนิ้วเข้าไปในช่องระหว่างถุงและส่วนที่เป็นกาวย และลอกแผ่นฟิล์มของเทปกาวออก
- ติดอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้ย่น

5) กัดทับส่วนที่เป็นกาวยให้แนบสนิทกับผิวหนัง

- กัดทับบริเวณรอบทวารเทียมและเทปกาวให้ดีเพื่อที่จะติดแป้นที่ผิวหนังให้แนบสนิท

[กรณีแบบนี้จะใช้อุปกรณ์เหล่านี้]

- 1) กรณีที่ทำกรวดขนาดทวารเทียมจะใช้สเกลที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์
- 2) กรณีที่ต้องการยึดอุปกรณ์ให้มั่นคงขึ้นสามารถใช้ < ทรังค์ เบลท์ > ที่แยกขายต่างหากได้

(3) วิธีติดถุงทวารเทียม

- 1) ให้ส่วนประกบของแป้นและถุงทวารเทียมตรงกัน
- 2) ใช้นิ้วกดเพื่อประกบถุงกับแป้นให้ประกบเข้ากันให้สนิท
- 3) เช็คความเรียบร้อยส่วนประกบว่าได้ประกบเข้ากันอย่างสนิทหรือไม่
- 4) เมื่อต้องการถอดถุงทวารเทียมออก กัดทับแผ่นของแป้นไว้และดึงถุงทวารเทียมออก

(4)วิธีใช้คลิปและวิธีจัดการอุจจาระ

[วิธีใช้คลิป]

- 1)เปิดคลิปโดยกดสตอปเปอร์ (ส่วนที่เกี่ยวข้อง) ไว้และดึงขึ้น
เมื่อเปิดคลิปแล้วควรระมัดระวังไม่ให้ส่วนที่เป็นจุดพับบิดงอ
- 2)พันถุงทวารเทียมกับแขนของคลิป (ส่วนที่ดึงขึ้น) 1 รอบ
หันคลิปให้ส่วนโค้งของคลิปเข้ากับร่างกาย
- 3)กดสตอปเปอร์ไว้และปิดคลิป
สุดท้ายตรวจสอบคลิปว่าปิดสนิทอยู่หรือไม่

[วิธีจัดการอุจจาระ]

- 1)ถอดคลิปโดยกดสตอปเปอร์และดึงคลิปลง
- 2)พับตกลงปลายถุงทวารเทียมขึ้นไว้ด้านนอกและระบายอุจจาระออก
*ป้องกันไม่ให้มือเปื้อนและกลิ่นเหม็นรั่วออกได้เนื่องจากปลายถุงทวารเทียมไม่สัมผัสกับอุจจาระ
- 3)ดึงปลายถุงทวารเทียมที่พับตกลงขึ้นไว้ลงมาให้เป็นสภาพเดิมและปิดคลิป


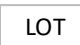
2. ข้อควรระวังในการใช้งาน

- ไม่ควรหาจำพวกยาขับฝึ่งบริเวณรอบทวารเทียม ซึ่งอาจทำให้ประสิทธิภาพในการติดแน่นของแป้นลดลงได้
- ไม่ควรพับอุปกรณ์ขณะติดอยู่กับทวารเทียม
- ไม่ควรติดไว้ต่อเนื่องมากกว่าหนึ่งอาทิตย์
- ไม่ควรนำอุปกรณ์ที่ลอกออกมาครั้งหนึ่งแล้วไปติดซ้ำอีกครั้ง
- ไม่ควรใช้มือที่จับน้ำมันสัมผัสกับพื้นผิวด้านที่มีกาว
- ไม่ควรเปลี่ยนอุปกรณ์ทันทีหลังอาบน้ำ
*อาจลอกออกยากเนื่องจากประสิทธิภาพในการติดแน่นเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิของแป้นที่สูงขึ้น
*หลังอาบน้ำควรทิ้งไว้อย่างน้อย 30 นาที จากนั้นเช็คว่าอุณหภูมิของแป้นได้ลดลงหรือไม่แล้วค่อยเปลี่ยนอุปกรณ์
- หากพื้นผิวด้านที่มีกาวของแป้นเย็นอาจทำให้แป้นติดไม่แน่นเท่าที่ควร
กรณีเช่นนี้ควรย้ายไปห้องที่อุ่นและทำให้ทั่วบริเวณของแป้นอุ่นขึ้นก่อนใช้งาน
- รูที่ตัดบนแป้นนั้นต้องไม่กินเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใช้งานได้ตามที่กำหนดไว้
- หากใช้งานแล้วไม่ถูกกับผิวหนังควรเลิกใช้งานและปรึกษาแพทย์หรือพยาบาล

3. เงื่อนไขการเก็บรักษา

- ไม่ควรเก็บในที่ที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูง
- ไม่ควรเก็บในที่ที่มีอุณหภูมิต่ำ (เช่น ตู้เย็น)
- ไม่ควรเก็บในที่ที่มีแสงแดดส่องถึง
- ไม่ควรเก็บในที่ที่ถูกกดทับ
- ไม่ควรเก็บเป็นเวลานาน
- ไม่ควรเก็บในสภาพที่แผ่นฟิล์ม (เซพพาราเตอร์) ได้ลอกออกจากแป้น

4. เครื่องหมาย (สัญลักษณ์)

SYMBOLS	
	Expiry Date
	Lot number

...(1)

...(2)

(1) วันหมดอายุ : ห้ามใช้งานหากเกินวันหมดอายุนี้

(2) ล็อตการผลิต : เลขที่แสดงครั้งที่ผลิต

=====

[ข้อมูลผู้นำเข้า]

ผู้นำเข้า : บริษัท มารูเบน (ประเทศไทย) จำกัด (สาขากรุงเทพฯ ของบริษัท มารูเบน คอร์ปอเรชั่น จำกัด)

ที่อยู่ : 130-132 ชั้น 10-11 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10330 ประเทศไทย

โทร : 02256 6900

=====

- อ่านคู่มือการใช้งานนี้และทำความเข้าใจคุณสมบัติของสินค้าให้ดีขึ้นก่อนใช้งาน
- โปรดเก็บคู่มือการใช้งานนี้ไว้ในบริเวณที่หยิบได้ง่ายตลอดเวลาเพื่อใช้อ้างอิงได้ตามความจำเป็น