

คู่มือการใช้งาน

ชื่อเครื่องมือแพทย์: โพรแคร้ เพสท์

คำอธิบายเครื่องมือแพทย์: ผลิตภัณฑ์ปกป้องผิวหนังชนิดครีม

วัตถุประสงค์การใช้งาน: เพิ่มการติดแน่นระหว่างผลิตภัณฑ์ปกป้องผิวหนังชนิดต่าง ๆ กับผิวหนังให้สูงขึ้น รวมทั้งลดปัญหาผิวหนังที่เกิดจากการร้าวออกของสิ่งขับถ่าย

1. ขั้นตอนการใช้งาน

(1) ก่อนใช้

- ใช้กระดาษทิชชูเช็ดสิ่งขับถ่ายที่ติดอยู่ที่บริเวณรอบทวารเทียมออกให้เรียบร้อย
 - ทำให้ผ้าก๊อชเปียกชื้นและถูสบู่ให้เกิดฟองเพียงพอ
ใช้ผ้าก๊อชข้างต้นเช็ดบริเวณรอบทวารเทียมให้สะอาดเรียบร้อย
 - ใช้ผ้าก๊อชผืนใหม่ที่ได้แช่ในน้ำอุ่นล้างสบู่ออกให้เรียบร้อย
หิ้งไว้ให้แห้งเอง
- *ไม่ควรใช้เครื่องเป่าผมเนื่องจากทวารเทียมมีความละเอียดอ่อนต่อการกระตุ้นจากลมร้อนของเครื่องเป่าผม

(2) เปิดซีลของหลอด

- ใช้ส่วนแหลมของปลายฝาหลอดเจาะฉีกซีลตรงรูระบายของหลอด
*นำส่วนแหลมเสียบตรงรูระบายไว้และหมุนหลายรอบเพื่อให้รูเจาะเรียบเนียน
- กรณีที่ส่วนที่ถูกเจาะของซีลตรงรูระบายนั้นเกินออกมาด้านนอก :
*หากใช้ในสภาพแบบนี้อาจบาดเจ็บได้
*ควรกำจัดออกโดยใช้กรรไกรหรือสิ่งอื่น ๆ ที่เหมาะสมโดยไม่ควรถือมือกำจัดออกโดยตรง

(3) ทาโพรแคร้ เพสท์บนแป้นด้านที่ติดกับผิวหนัง

- ทาโพรแคร้ เพสท์ตรงบริเวณรอบรูที่ตัดตามขนาดทวารเทียมในปริมาณพอเหมาะ

(4) ทำให้โพรแคร้ เพสท์แห้ง

- เมื่อทาโพรแคร้ เพสท์บนแป้นแล้วปล่อยให้แห้งประมาณ 1 นาทีเพื่อให้พื้นผิวแห้ง
- หากใช้น้ำจับแล้วไม่ติดนิ้วถือว่าแห้งแล้ว

(5) ใช้นิ้วกระจายโพรแคร้ เพสท์

- เช็คว่าสภาพพื้นผิวของโพรแคร้ เพสท์แห้งแล้ว จากนั้นใช้นิ้วลูบเนื้อครีมเบา ๆ เพื่อให้มีความหนาประมาณ 2 mm
- หากโพรแคร้ เพสท์ติดนิ้วไม่ควรฝืนลอกออกแต่ควรใช้น้ำอุ่นทำให้เนื้อครีมเปียกชื้นและค่อย ๆ ลอกออก

(6) ติดแป้น

- เช็คว่าสภาพโพรแคร้ เพสท์แห้งอยู่ จากนั้นค่อยติดแป้น
- ขณะเปลี่ยนอุปกรณ์ไม่ควรฝืนลอกโพรแคร้ เพสท์ที่ยังเหลืออยู่บนผิวหนังออก
- หากต้องการลอกออกควรใช้น้ำอุ่นทำให้เนื้อครีมเปียกชื้นและค่อย ๆ ลอกออก

(7) หลังใช้

- เช็ดโปรแกรมที่ติดบริเวณรอบรูระบายของหลอดออกให้สะอาด

*หากยังมีครีติดอยู่ :

อาจไม่สามารถปิดฝาให้สนิทได้จึงทำให้เนื้อครีมภายในหลอดแข็งและไม่สามารถใช้หมดหลอดได้

2. ข้อควรระวังในการใช้งาน

- ควรหลีกเลี่ยงใช้หรือเก็บบริเวณใกล้ไฟ

*เนื่องจากอาจติดไฟได้

- ควรเก็บให้พ้นมือเด็กเล็ก

*หากกลืนเข้าไปไม่ควรทำให้อาเจียน ควรไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาทันที

- หากเข้าตาควรล้างด้วยน้ำให้เพียงพอทันที จากนั้นควรไปพบแพทย์เฉพาะทางเพื่อรับการรักษา

- ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ด้วย

*สำหรับผู้ที่ไม่ต่อแอลกอฮอล์ไม่ควรใช้

*ไม่ควรใช้กับส่วนของผิวหนังที่มีแผล, บวม, เป็นผื่น เป็นต้น

- ไม่ควรทาผลิตภัณฑ์นี้ที่ผิวหนังโดยตรง

*เนื่องจากแอลกอฮอล์อาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังได้

- หากมีความผิดปกติเกิดขึ้นกับผิวหนังควรหยุดใช้และปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง

- ควรหลีกเลี่ยงใช้ในที่ปิดไม่มีอากาศถ่ายเท

*เนื่องจากหากสูดดมกลิ่นแอลกอฮอล์แล้วอาจส่งผลเสียต่อร่างกายได้

- ส่วนแหลมของปลายฝาหลอดนั้นมีไว้เพื่อเปิดซิลของหลอด

*ขณะใช้หรือขณะเก็บควรระมัดระวังให้ดีเพื่อไม่ให้บาดเจ็บหรือส่วนอื่น

- หลังใช้ควรปิดฝาหลอดให้สนิท

*เนื่องจากอาจทำให้เนื้อครีมภายในหลอดแข็งและไม่สามารถใช้หมดหลอดได้



3. เงื่อนไขการเก็บรักษา

- ไม่ควรเก็บในที่ที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูง

*หากเก็บผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ใช้ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูง :

อาจทำให้หลอดพองตัวขึ้นและแตกหรือเนื้อครีมพุ่งออกมาขณะเปิดซิลของหลอดได้

4. เครื่องหมาย (สัญลักษณ์)

SYMBOLS	
	Expiry Date ... (1)
	Lot number ... (2)

(1) วันหมดอายุ : ห้ามใช้งานหากเกินวันหมดอายุนี้

(2) ลีตการผลิต : เลขที่แสดงครั้งที่ผลิต

=====

[ข้อมูลผู้นำเข้า]

ผู้นำเข้า : บริษัท มารูเบนิ (ประเทศไทย) จำกัด (สาขากรุงเทพฯ ของบริษัท มารูเบนิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด)

ที่อยู่ : 130-132 ชั้น 10-11 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10330 ประเทศไทย

โทร : 02256 6900

=====

- อ่านคู่มือการใช้งานนี้และทำความเข้าใจคุณสมบัติของสินค้าให้ดีก่อนใช้งาน
- โปรดเก็บคู่มือการใช้งานนี้ไว้ในบริเวณที่หยิบได้ง่ายตลอดเวลาเพื่อใช้อ้างอิงได้ตามความจำเป็น