

คู่มือการใช้งาน

ชื่อเครื่องมือแพทย์ : โพรแคร่ พาวเดอร์

คำอธิบายเครื่องมือแพทย์ : ผลิตภัณฑ์ปกป้องผิวหนังชนิดผงแป้ง

วัตถุประสงค์การใช้งาน : อุดช่องว่างระหว่างแป้นของอุปกรณ์ทวารเทียมกับทวารเทียม

1. ขั้นตอนการใช้งาน

- (1) ล้างผิวหนังส่วนที่ต้องการใช้โพรแคร่ พาวเดอร์ให้เพียงพอ จากนั้นปล่อยให้ผิวหนังแห้ง
- (2) โรยโพรแคร่ พาวเดอร์ตรงส่วนที่ต้องการใช้ จากนั้นติดอุปกรณ์ทวารเทียม
- (3) หากมีช่องว่างระหว่างแป้นของอุปกรณ์ทวารเทียมกับทวารเทียม ใช้โพรแคร่ พาวเดอร์อุดช่องว่าง

2. ข้อควรระวังในการใช้งาน

● ก่อนใช้

* ควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์หรือพยาบาล

* ควรอ่านข้อควรระวังให้ละเอียดถี่ถ้วนเพื่อทำความเข้าใจคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์นี้ให้เพียงพอ

● ผลิตภัณฑ์นี้ไม่สามารถรับประทานได้

● ควรเก็บรักษาอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้มีการรับประทานเข้าไปโดยไม่ได้ตั้งใจ

* เก็บในที่ให้พ้นมือผู้สูงอายุ, ผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม, เด็กทารกและเด็กเล็ก

● หากใช้งานแล้วไม่ถูกกับผิวหนังควรเลิกใช้งานและปรึกษาแพทย์หรือพยาบาล

● หลังใช้เสร็จควรปิดฝาให้แน่นและเก็บรักษาในอุณหภูมิห้อง


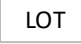
● หากมีโพรแคร่ พาวเดอร์เล็ดบนผิวหนังควรเช็ดออก

3. เงื่อนไขการเก็บรักษา

● ไม่ควรเก็บในที่ที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูง

● ไม่ควรเก็บในที่ที่มีอุณหภูมิต่ำ (เช่น ตู้เย็น)

4. เครื่องหมาย (สัญลักษณ์)

SYMBOLS	
	Expiry Date ... (1)
	Lot number ... (2)

(1)วันหมดอายุ : ห้ามใช้งานหากเกินวันหมดอายุนี้

(2)ลอตการผลิต : เลขที่แสดงครั้งที่ผลิต

=====

[ข้อมูลผู้นำเข้า]

ผู้นำเข้า : บริษัท มารูเบน (ประเทศไทย) จำกัด (สาขากรุงเทพฯ ของบริษัท มารูเบน คอร์ปอเรชั่น จำกัด)
ที่อยู่ : 130-132 ชั้น 10-11 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10330 ประเทศไทย
โทร : 02256 6900

=====

- อ่านคู่มือการใช้งานนี้และทำความเข้าใจคุณสมบัติของสินค้าให้ดีก่อนใช้งาน
- โปรดเก็บคู่มือการใช้งานนี้ไว้ในบริเวณที่หยิบได้ง่ายตลอดเวลาเพื่อใช้อ้างอิงได้ตามความจำเป็น