

คู่มือการใช้งาน

ชื่อเครื่องมือแพทย์ : โพรแคร์ เอ็มเอฟ เพท

คำอธิบายเครื่องมือแพทย์ : ผลิตภัณฑ์ปกป้องผิวหนังชนิดครีม

วัตถุประสงค์การใช้งาน : ปกป้องผิวบริเวณรอบทวารเทียมทั่วไป, ทวารเทียมที่มีลักษณะหดตัว จากสิ่งขั้บถ่าย

1. ขั้นตอนการใช้งาน

(1) ใช้กับรอยย่นหรือรอยปุ่มบริเวณรอบทวารเทียม

- ใช้ โพรแคร์ เอ็มเอฟ เพท ทาลงบนรอยย่นหรือรอยปุ่มบริเวณรอบทวารเทียม
- ทำหน้าห้องให้อยู่ในลักษณะแบนราบ

(2) ทำให้อุปกรณ์ทวารเทียมติดแน่นมากขึ้น

- อดช่องว่างระหว่างทวารเทียมกับอุปกรณ์ทวารเทียม
- ทำให้แป้นหรือเวเฟอร์ชนิดต่าง ๆ ติดแน่นมากขึ้น

2. โพรแคร์ เอ็มเอฟ เพท

(1) ใช้นิ้วทา

- เมื่อใช้นิ้วทา ควรทำให้นิ้วเปียกน้ำก่อนทา โพรแคร์ เอ็มเอฟ เพท
- *ทำให้มือไม่เหนียวเหนอะหนะ

(2) ทาที่แป้นหรือเวเฟอร์ไว้ล่วงหน้า

- ทา โพรแคร์ เอ็มเอฟ เพท รอบรูที่ติดบนแป้นหรือเวเฟอร์ (ด้านที่ติดกับผิวหนัง) ในปริมาณพอเหมาะและติดกับผิวหนัง
- ไม่จำเป็นต้องเช็ด โพรแคร์ เอ็มเอฟ เพท ที่ล้นออกจากช่องว่างของแป้นออก


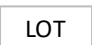
3. ข้อควรระวังในการใช้งาน

- สำหรับผู้ที่ผิวแห้งบอบบางนั้นควรใช้อย่างระมัดระวัง
- หากใช้งานแล้วไม่ถูกกับผิวหนึ่งควรเลิกใช้งาน
- ต้องใช้กับผิวหนังที่มีสภาพปกติเท่านั้น (Use for the healthy skin only.)
- ควรหลีกเลี่ยงการแช่น้ำร้อนที่อุณหภูมิสูงเป็นเวลานาน

4. เงื่อนไขการเก็บรักษา

- ควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง
- ควรเก็บให้พ้นมือเด็กเล็ก
- ไม่ควรเก็บในที่ที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูง
- ไม่ควรเก็บในที่ที่มีอุณหภูมิต่ำ (เช่น ตู้เย็น)
- ห้ามรับประทาน (ไม่ใช่ของที่รับประทานได้ โปรดระมัดระวัง)

5. เครื่องหมาย (สัญลักษณ์)

SYMBOLS	
	Expiry Date ... (1)
	Lot number ... (2)

- (1) วันหมดอายุ : ห้ามใช้งานหากเกินวันหมดอายุนี้
- (2) ลีตการผลิต : เลขที่แสดงครั้งที่ผลิต

=====

[ข้อมูลผู้นำเข้า]

ผู้นำเข้า : บริษัท มารูเบน (ประเทศไทย) จำกัด (สาขากรุงเทพฯ ของบริษัท มารูเบน คอร์ปอเรชั่น จำกัด)
ที่อยู่ : 130-132 ชั้น 10-11 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10330 ประเทศไทย
โทร : 02256 6900

=====

- อ่านคู่มือการใช้งานนี้และทำความเข้าใจคุณสมบัติของสินค้าให้ดีก่อนใช้งาน
- โปรดเก็บคู่มือการใช้งานนี้ไว้ในบริเวณที่หยิบได้ง่ายตลอดเวลาเพื่อใช้อ้างอิงได้ตามความจำเป็น