

คู่มือการใช้งาน

ชื่อเครื่องมือแพทย์ : ยูแคร์ (สำหรับทวารเทียมระบบทางเดินอาหาร)

คำอธิบายเครื่องมือแพทย์ : ถุงทวารเทียมสำหรับระบบทางเดินอาหารชนิดขึ้นเดียว

วัตถุประสงค์การใช้งาน : กักเก็บสิ่งขับถ่าย (อุจจาระ) จากทวารเทียมระบบทางเดินอาหารไว้ชั่วคราว

1. ขั้นตอนการใช้งาน

(1) วิธีติดอุปกรณ์ทวารเทียม

1) วัดขนาดทวารเทียม

- วัดขนาดทวารเทียม
- ตัดรูที่แผ่นคัตติงเกลให้มีขนาดเท่าทวารเทียม
- ตัดรูตรงกลางของแผ่นคัตติงเกล
- แผ่นคัตติงเกลนี้เก็บไว้เป็นแบบสำหรับตัดแป้น
 - * ขนาดทวารเทียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
 - * ควรวัดขนาดอย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน
 - * ควรรู้ขนาดทวารเทียมที่ถูกต้องไว้เสมอ

2) ตัดรูบนแป้น

- พลิกแผ่นคัตติงเกลที่ได้ตัดรูแล้วให้กลับด้านและนำไปวางทับกับแป้นด้านที่มีแผ่นฟิล์มติดอยู่
- ขีดเส้นบนแป้นตามขนาดรูของแผ่นคัตติงเกล
- ตัดรูบนแป้นโดยให้มีขนาดใหญ่กว่าเส้นขีดดังกล่าวประมาณ 1-2 mm
 - * เมื่อตัดรูบนแป้น ต้องระมัดระวังไม่ให้ปลายของกรรไกรทำให้ถุงทวารเทียมเสียหาย
 - * ใช้น้ำถูรอยตัดของแป้นให้เรียบเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายกับทวารเทียม

3) ตรวจสอบขนาดรู

- ก่อนลอกแผ่นฟิล์มออก นำแป้นไปทับกับทวารเทียมเพื่อตรวจสอบว่าขนาดรูพอดีหรือไม่

4) ลอกแผ่นฟิล์มออก

- ตรวจสอบผิวหนังว่าแห้งสนิท
- ลอกแผ่นฟิล์มออกจากแป้น

5) ติดแป้นและกดให้แนบสนิทกับผิวหนัง

- ทำหน้าท้องให้อยู่ในลักษณะแบนราบ
- จากนั้นติดแป้น
- ใช้มือกดแป้นเบา ๆ และลูบไปทางด้านนอกจากบริเวณรอบทวารเทียมเพื่อที่จะติดแป้นที่ผิวหนังให้แนบสนิท
 - * ไม่ควรดึงผิวหนังมากจนเกินไปขณะที่ติดแป้น
 - * ไม่ควรใช้จำพวกยาขี้ผึ้งประกอบกันเนื่องจากอาจทำให้ประสิทธิภาพในการติดแน่นของแป้นลดลงได้

[แนะนำให้ใช้เทปกั้นน้ำขณะอาบน้ำ]

- แนะนำให้ใช้เทปกั้นน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้ผิวหนังด้านนอกของแป้นละลายหรือแป้นหลุดออก
- * หลังอาบน้ำควรใช้ผ้าแห้งเช็ดน้ำที่ติดอยู่กับถุงทวารเทียมออก

(2) วิธีเปิด-ปิดช่องระบาย

[วิธีเปิด/วิธีปิดช่องระบาย]

1) เปิดคลิปหนีบปลายถุงทวารเทียม

- เปิดคลิปโดยกดสตอปเปอร์ (ส่วนที่เกี่ยวข้อง) ไว้และดึงขึ้น

2) พันถุงทวารเทียม

- พันถุงทวารเทียมกับแขนของคลิป (ส่วนที่ดึงขึ้น) 1 รอบ
- * หันคลิปให้ส่วนโค้งของคลิปเข้ากับร่างกาย

3) ปิดคลิป

- กดสตอปเปอร์ไว้และปิดคลิป
- * สุดท้ายตรวจสอบคลิปว่าปิดสนิทอยู่หรือไม่

[วิธีเปิดช่องระบาย / วิธีระบาย]

1) ถอดคลิปออก

- จับถุงทวารเทียมไว้ให้แน่น
- ถอดคลิปโดยกดสตอปเปอร์ไว้และดึงลง
- * จับถุงทวารเทียมไว้เพื่อป้องกันไม่ให้อุจจาระระบายออกทันทีขณะถอดคลิปออก

2) ระบายอุจจาระออก

- พับขอบช่องระบายขึ้นไว้ด้านนอกเพื่อไม่ให้อุจจาระติดที่ปลายถุงทวารเทียม (เพื่อป้องกันไม่ให้มีกลิ่นรั่วออกมา)
- หันช่องระบายไปด้านล่างและระบายอุจจาระออกจากถุงทวารเทียม
- * ถุงทวารเทียมมีรูปทรงปลายบานออกเพื่อสะดวกในการพับขอบขึ้น

3) ใช้คลิปปิดปลายถุงทวารเทียม

- เมื่อระบายอุจจาระออกเสร็จแล้ว ใช้กระดาษชำระหรือกระดาษอื่น ๆ เช็ดบริเวณช่องระบายให้สะอาด
- ดึงช่องระบายที่พับขอบขึ้นไว้ลงมาให้เป็นสภาพเดิม
- ใช้คลิปปิดช่องระบายอีกครั้ง

2. ข้อควรระวัง (ตัวกรองกลิ่นที่ระบายแก๊สได้)

- ตัวกรองกลิ่นนี้จะสามารถค่อย ๆ ระบายแก๊สที่ถูกสะสมภายในถุงทวารเทียมออกได้
- * มีโครงสร้างที่ไม่ให้สิ่งขับถ่ายภายในถุงทวารเทียมผ่านตัวกรองกลิ่นและซึมออกมา

[ข้อสำคัญ]

ในกรณีดังต่อไปนี้ควรนำแผ่นซิลสำหรับปิดครอบตัวกรองที่อยู่ในกล่องบรรจุภัณฑ์ติดครอบตัวกรองเพื่อปิดรูที่อากาศผ่าน

1) กรณีแก๊สถูกสะสมมากเกินไป

- หากแก๊สถูกสะสมมากเกินไปทำให้ภายในถุงมีสภาพคล้ายสุญญากาศ และอาจทำให้อุจจาระที่ระบายออกจากทวารเทียมไม่ตกลงไปในถุงและถูกสะสมบริเวณรอบทวารเทียมได้
- นำแผ่นซิลสำหรับปิดครอบตัวกรองที่อยู่ในกล่องบรรจุภัณฑ์ติดครอบตัวกรองเพื่อปิดรูที่อากาศผ่านปล่อยให้ก๊าซสะสมอยู่ในถุงทวารเทียม
- เมื่อแก๊สถูกสะสมภายในถุงทวารเทียมแล้ว ลอกแผ่นซิลออกและใช้มือกดถุงทวารเทียมเบา ๆ เพื่อระบายแก๊ส

2) กรณีอาบน้ำ

- ขณะอาบน้ำหากน้ำจากภายนอกสัมผัสกับตัวกรองทำให้ถ่านกัมมันต์ดูดซับน้ำ และหลังอาบน้ำเสร็จน้ำที่มีถ่านกัมมันต์เจือปนอาจจะซึมออกมาและทำให้เสื้อผ้าเปื้อนได้

3. ข้อควรระวังในการใช้งาน

ควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์หรือพยาบาล

รวมทั้งอ่านข้อควรระวังอย่างละเอียดถี่ถ้วนและทำความเข้าใจคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์นี้ให้ดีก่อนใช้งาน

หากใช้งานไม่ถูกต้องอาจทำให้มีสิ่งขับถ่ายเกิดการรั่วและทำให้ผิวหนังอักเสบจากการรั่วดังกล่าวได้


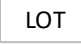
ทั้งนี้หากใช้งานแล้วไม่ถูกกับผิวหนังควรเลิกใช้งาน

- ไม่ควรทาจำพวกยาซีผึ้งบริเวณรอบทวารเทียมซึ่งอาจทำให้ประสิทธิภาพในการติดแน่นของแป้นลดลงได้
- ไม่ควรสัมผัสพื้นผิวของแป้นที่ได้ลอกแผ่นฟิล์มออกด้วยนิ้วหรือสิ่งอื่น ๆ
- ไม่ควรนำอุปกรณ์ที่ลอกออกมาครั้งหนึ่งแล้วไปติดซ้ำอีกครั้ง
- ไม่ควรล้างภายในถุงทวารเทียมที่กำลังใช้งานอยู่ด้วยน้ำหรือสิ่งอื่น ๆ
- ไม่ควรพับอุปกรณ์ขณะติดอยู่กับทวารเทียม
- หากพื้นผิวด้านที่มีกาวของแป้นเย็บอาจทำให้แป้นติดไม่แน่นเท่าที่ควร
กรณีเช่นนี้ควรย้ายไปห้องที่อุ่นและทำให้ทวารเทียมของแป้นอุ่นขึ้นก่อนใช้งาน
- กรณีใช้แป้นแบบตัดเอง ควรใช้งานภายในเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใช้งานได้ตามที่กำหนดไว้
- ไม่ควรกักเก็บสิ่งขับถ่ายไว้ในถุงทวารเทียมมากเกินไป ซึ่งควรทิ้งตามความเหมาะสม
- ไม่ควรใช้อุปกรณ์นานเกินควร
- หากใช้งานแล้วไม่ถูกกับผิวหนังควรเลิกใช้งานและปรึกษาแพทย์หรือพยาบาล

4. เงื่อนไขการเก็บรักษา

- ไม่ควรเก็บในที่ที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูง
- ไม่ควรเก็บในที่ที่มีอุณหภูมิต่ำ (เช่น ตู้เย็น)
- ไม่ควรเก็บในที่ที่มีแสงแดดส่องถึง
- ไม่ควรเก็บในที่ที่ถูกกดทับ
- ไม่ควรเก็บเป็นเวลานาน
- ไม่ควรเก็บในสภาพที่แผ่นฟิล์มของแป้นถูกลอกออก

5. เครื่องหมาย (สัญลักษณ์)

SYMBOLS	
	Expiry Date ... (1)
	Lot number ... (2)

(1) วันหมดอายุ : ห้ามใช้งานหากเกินวันหมดอายุนี้

(2) ล็อตการผลิต : เลขที่แสดงครั้งที่ผลิต

=====

[ข้อมูลผู้นำเข้า]

ผู้นำเข้า : บริษัท มารูเบน (ประเทศไทย) จำกัด (สาขากรุงเทพฯ ของบริษัท มารูเบน คอร์ปอเรชั่น จำกัด)

ที่อยู่ : 130-132 ชั้น 10-11 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10330 ประเทศไทย

โทร : 02256 6900

=====

- อ่านคู่มือการใช้งานนี้และทำความเข้าใจคุณสมบัติของสินค้าให้ดีก่อนใช้งาน
- โปรดเก็บคู่มือการใช้งานนี้ไว้ในบริเวณที่หยิบได้ง่ายตลอดเวลาเพื่อใช้อ้างอิงได้ตามความจำเป็น