

คู่มือการใช้งาน

ชื่อเครื่องมือแพทย์ : ยูแคร์ (ถุงทวารเทียมสำหรับระบบทางเดินปัสสาวะ)

คำอธิบายเครื่องมือแพทย์ : ถุงทวารเทียมสำหรับระบบทางเดินปัสสาวะชนิดขึ้นเดียว

วัตถุประสงค์การใช้งาน : กักเก็บสิ่งขับถ่าย (ปัสสาวะ) จากทวารเทียมระบบทางเดินปัสสาวะไว้ชั่วคราว

1. ขั้นตอนการใช้งาน

(1) วิธีติดอุปกรณ์ทวารเทียม

1) วัดขนาดทวารเทียม

- วัดขนาดทวารเทียม
- ตัดรูที่แผ่นคัตติงเกลให้มีขนาดเท่าทวารเทียม
- ตัดรูตรงกลางของแผ่นคัตติงเกล
- แผ่นคัตติงเกลนี้เก็บไว้เป็นแบบสำหรับตัดแป้น
 - * ขนาดทวารเทียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
 - * ควรวัดขนาดอย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน
 - * ควรรู้ขนาดทวารเทียมที่ถูกต้องไว้เสมอ

2) ตัดรูบนแป้น

- พลิกแผ่นคัตติงเกลที่ได้ตัดรูแล้วให้กลับด้านและนำไปวางทับกับแป้นด้านที่มีแผ่นฟิล์มติดอยู่
- ชีดเส้นบนแป้นตามขนาดรูของแผ่นคัตติงเกล
- ตัดรูบนแป้นโดยให้มีขนาดใหญ่กว่าเส้นชีดดังกล่าวประมาณ 1-2 mm
 - * เมื่อตัดรูบนแป้น ต้องระมัดระวังไม่ให้ปลายของกรรไกรทำให้ถุงทวารเทียมเสียหาย
 - * ใช้นิ้วถูรอยตัดของแป้นให้เรียบเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายกับทวารเทียม

3) ตรวจสอบขนาดรู

- ก่อนลอกแผ่นฟิล์มออก นำแป้นไปทับกับทวารเทียมเพื่อตรวจสอบว่าขนาดรูพอดีหรือไม่

4) ลอกแผ่นฟิล์มออก

- ตรวจสอบผิวหนังว่าแห้งสนิท
- ลอกแผ่นฟิล์มออกจากแป้น

5) ติดแป้นและกดให้แนบสนิทกับผิวหนัง

- ทำหน้าห้องให้อยู่ในลักษณะแบนราบ
- จากนั้นติดแป้น
- ใช้มือกดแป้นเบา ๆ และลูบไปทางด้านนอกจากบริเวณรอบทวารเทียมเพื่อที่จะติดแป้นลงกับผิวหนังให้แนบสนิท
 - * ไม่ควรดึงผิวหนังมากเกินไปขณะที่ติดแป้น
 - * เนื่องจากมีปัสสาวะออกมาเรื่อย ๆ ขณะเปลี่ยนอุปกรณ์ ดังนั้นให้ใช้ผ้าก๊อชม้วน (ผ้าก๊อชที่ม้วนแล้วติดเทปไว้) คอยซับปัสสาวะพร้อมติดแป้นตามจังหวะที่เหมาะสม
 - * ไม่ควรใช้จำพวกยาซีผึ้งประกอบกันเนื่องจากอาจทำให้ประสิทธิภาพในการติดแน่นของแป้นลดลงได้

[แนะนำให้ใช้เทปกั้นน้ำขณะอาบน้ำ]

- แนะนำให้ใช้เทปกั้นน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้ผิวหนังนอกของแป้นละลายหรือแป้นหลุดออก
- * หลังอาบน้ำควรใช้ผ้าแห้งเช็ดน้ำที่ติดอยู่กับถุงทวารเทียมออก

(2) วิธีเปิด-ปิดช่องระบาย

[วิธีเปิด/วิธีปิดช่องระบาย]

1) ถอดฝาครอบออก

- ตรวจสอบว่าลูกล็อก 2 ชั้นอยู่ (ไม่สามารถหมุนทวนเข็มนาฬิกาได้เมื่อดูจากด้านบน)
- * ในสภาพที่ลูกล็อกอยู่ ปัสสาวะจะยังไม่ไหลออกจากถุง

2) ระบายปัสสาวะออก

- หมุนก้านเปิดปิด 180 องศา (ตามเข็มนาฬิกาเมื่อดูจากด้านบน)
- * เมื่อหมุนแล้วปัสสาวะจะถูกระบายออก

3) ใส่ฝาครอบ

- เมื่อระบายปัสสาวะออกเสร็จ หมุนก้านเปิดปิดกลับตำแหน่งเดิมและใส่ฝาครอบ
- * หากใส่ฝาครอบก่อนหมุนก้าน มักจะมีปัสสาวะค้างที่ส่วนปลาย

(3) วิธีใช้ท่อเชื่อม

- ใช้ท่อเชื่อมในกรณีที่ต้องการใช้ถุงเก็บปัสสาวะ
- ขณะใช้ท่อเชื่อมควรระมัดระวังไม่ให้ท่อถูกบิดหรือพับงอ

[วิธีต่อท่อเชื่อม]

1) เสียบหัวต่อ

- เสียบหัวต่อของถุงเก็บปัสสาวะเข้ากับท่อเชื่อมทางด้านปลายท่อ

2) เสียบท่อเชื่อม

- นำท่อเชื่อมเสียบกับถุงทวารเทียมที่ถอดเฉพาะฝาครอบออกให้แน่นอนกว่าจะมีเสียง "คลิก"
- เมื่อเสียบเสร็จตรวจสอบว่าเขี้ยวของท่อเชื่อมเกี่ยวเข้ากับซี่จุกถุงทวารเทียมอย่างสมบูรณ์อยู่หรือไม่

3) หมุนก้านเปิดปิด

- หมุนก้านเปิดปิด 180 องศา (ตามเข็มนาฬิกาเมื่อดูจากด้านบน)
- ระบายปัสสาวะออกจากถุงทวารเทียมผ่านท่อเชื่อมเข้าไปยังถุงเก็บปัสสาวะ

[วิธีถอดท่อเชื่อม]

1) หยุดการระบายปัสสาวะ

- หมุนก้านเปิดปิด 180 องศา (ทวนเข็มนาฬิกาเมื่อดูจากด้านบน)
- หยุดการระบายปัสสาวะออกจากถุงทวารเทียมผ่านท่อเชื่อมเข้าไปยังถุงเก็บปัสสาวะ

2) ดึงท่อเชื่อมออก

- ใช้นิ้วบีบปีกของท่อเชื่อม
- ให้เขี้ยวคลายล็อก
- ค่อย ๆ ดึงท่อเชื่อมออก

3) ใส่ฝาครอบ

- ใส่ฝาครอบปิดช่องระบายของถุงทวารเทียม

2. ข้อควรระวังในการใช้งาน

ควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์หรือพยาบาล

รวมทั้งอ่านข้อควรระวังอย่างละเอียดถี่ถ้วนและทำความเข้าใจคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์นี้ให้ดีก่อนใช้งาน

หากใช้งานไม่ถูกต้องอาจทำให้มีสิ่งขับถ่ายเกิดการรั่วและทำให้ผิวหนังอักเสบจากการรั่วดังกล่าวได้



ทั้งนี้หากใช้งานแล้วไม่ถูกกับผิวหนังควรเลิกใช้งาน

- ไม่ควรทำความสะอาดซี่ฝั้งบริเวณรอบทวารเทียม ซึ่งอาจทำให้ประสิทธิภาพในการติดแน่นของแป้นลดลงได้
- ไม่ควรสัมผัสพื้นผิวของแป้นที่ได้ลอกแผ่นฟิล์มออกด้วยนิ้วหรือสิ่งอื่น ๆ
- ไม่ควรนำอุปกรณ์ที่ลอกออกมาครั้งหนึ่งแล้วไปติดซ้ำอีกครั้ง
- ไม่ควรพับอุปกรณ์ขณะติดอยู่กับทวารเทียม
- กรณีใช้แป้นแบบตัดเอง ควรใช้งานภายในเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใช้งานได้ตามที่กำหนดไว้
- หากพื้นผิวด้านที่มีกาวของแป้นเย็นอาจทำให้แป้นติดไม่แน่นเท่าที่ควร
กรณีเช่นนี้ควรย้ายไปห้องที่อุ่นและทำให้ทั่วบริเวณของแป้นอุ่นขึ้นก่อนใช้งาน
- หากใช้งานแล้วไม่ถูกกับผิวหนังควรเลิกใช้งานและปรึกษาแพทย์หรือพยาบาล

3. เงื่อนไขการเก็บรักษา

- ไม่ควรเก็บในที่ที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูง
- ไม่ควรเก็บในที่ที่มีอุณหภูมิต่ำ (เช่น ตู้เย็น)
- ไม่ควรเก็บในที่ที่มีแสงแดดส่องถึง
- ไม่ควรเก็บในที่ที่ถูกกดทับ
- ไม่ควรเก็บเป็นเวลานาน
- ไม่ควรเก็บในสภาพที่แผ่นฟิล์มของแป้นถูกลอกออก

4. เครื่องหมาย (สัญลักษณ์)

SYMBOLS	
	Expiry Date ... (1)
	Lot number ... (2)

(1) วันหมดอายุ : ห้ามใช้งานหากเกินวันหมดอายุนี้

(2) ลีตการผลิต : เลขที่แสดงครั้งที่ผลิต

=====
[ข้อมูลผู้นำเข้า]

ผู้นำเข้า : บริษัท มารูเบน (ประเทศไทย) จำกัด (สาขากรุงเทพฯ ของบริษัท มารูเบน คอร์ปอเรชั่น จำกัด)

ที่อยู่ : 130-132 ชั้น 10-11 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10330 ประเทศไทย

โทร : 02256 6900
=====

- อ่านคู่มือการใช้งานนี้และทำความเข้าใจคุณสมบัติของสินค้าให้ดีก่อนใช้งาน
- โปรดเก็บคู่มือการใช้งานนี้ไว้ในบริเวณที่หยิบได้ง่ายตลอดเวลาเพื่อใช้อ้างอิงได้ตามความจำเป็น