

皮膚科学の力で
トラブルとストレスに負けない肌に

セルケア[®] シリーズ

オストミーシステム ● CELLCARE[®]

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825
www.alcare.co.jp

お問い合わせ：コールセンター

フリーダイヤル **0120-770-863** 土・日・祝日を除く
午前9：00～午後5：00

●本カタログの内容は2015年12月現在のものです。
●商品の仕様、デザインおよび価格は、改良や経済状況の変動などにより予告なく変更することがあります。
●本カタログに掲載の写真は、実際の色とは多少異なる場合がありますので、ご了承ください。




この印刷物は、EPAのシルバー基準に適合した
地球環境にやさしい印刷方法で作成されています
EPA：環境保護印刷推進協議会
<http://www.e3pa.com>

ÄLCARE

Innovative Solutions for
Best Care

皮膚科学の力から生まれた《セルケア®シリーズ》。 すこやかな皮膚から、いきいきとした生活がはじまります。

体の一部として、生活をともにするストーマ装具。
毎日を気持ちよく過ごせる、そんな存在でありたい。
その願いと皮膚科学の力が一つになり、
《セルケアシリーズ》は生まれました。
きれいな皮膚との出会いから、輝く笑顔が生まれ、
皮膚のような一体感で、体の動きが広がり、
意識しない使いやすさから、ゆとりが生まれる。
オストメイトのいきいきとした生活を、ともに支えます。

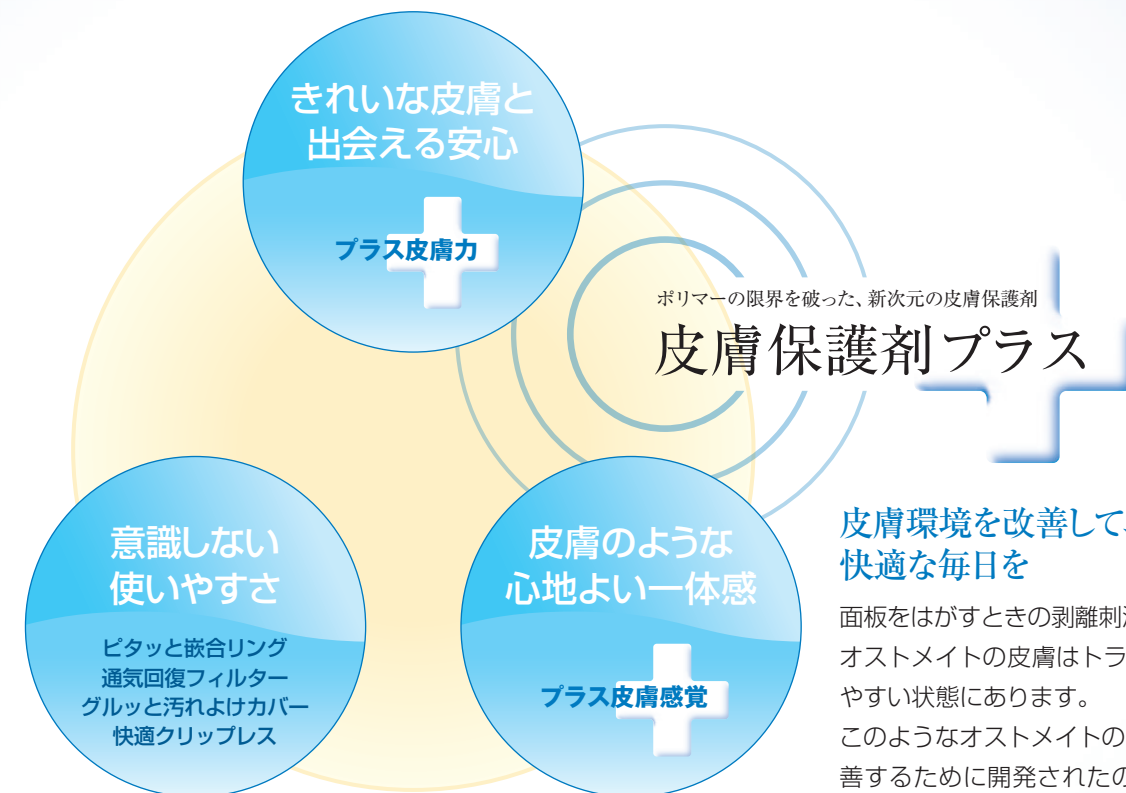


皮膚環境を改善して、 快適な毎日を

面板をはがすときの剥離刺激などにより、
オストメイトの皮膚はトラブルが起こり
やすい状態にあります。
このようなオストメイトの皮膚環境を改
善するために開発されたのが、新次元の
皮膚保護剤『皮膚保護剤プラス』です。トラ
ブルとストレスに負けない肌、オスト
メイトの快適な毎日を支えます。




数日に1度の装具交換。
それは、いつもは見ることのできない
皮膚と出会える大切な時間です。
装具をはずした後の皮膚がきれいだと、
ためらいなく再び貼ることができます。
すこやかな皮膚をまもる『皮膚保護剤プラス』は、
“きれいな皮膚との出会い”を導き、
輝く笑顔を支えます。

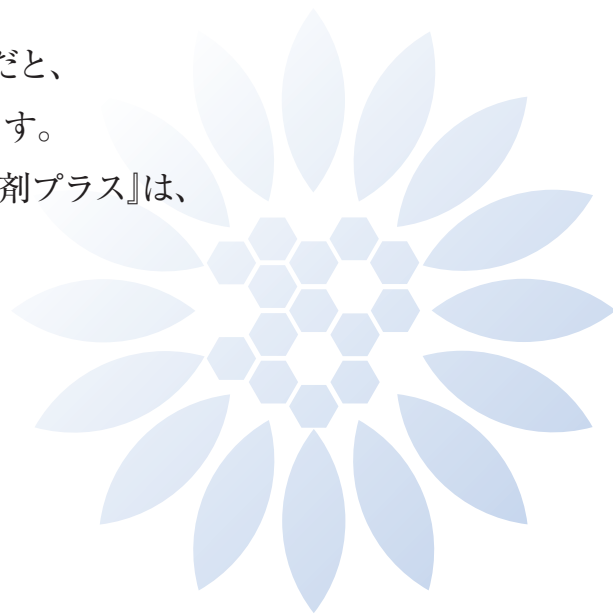

きれいな皮膚だから、笑顔輝く。

きれいな皮膚と出会える安心

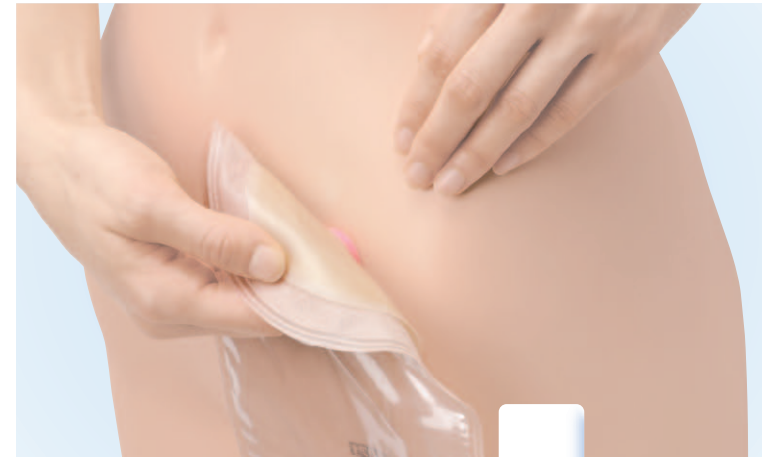

肌にしっとり **プラス皮膚力**


ポリマーの限界を、皮膚科学で破って誕生！

これまでの皮膚保護剤は、親水性／疎水性ポリマーの配合・成型を調整・工夫することで、貼付中の皮膚を守ってきました。
しかし、剥がすときには、剥離刺激により、未成熟な角層「明日の皮膚」を露出させてしまいがちでした。
アルケアは、オストメイトの皮膚トラブルの根本に着眼。
その解決のために、アルケアのスキンケア成分配合技術“リモイス”^{*}を応用し、
皮膚科学の力で、まったく新しい『皮膚保護剤プラス』を開発しました。

スキンケア成分を配合。

人の角層に多く存在する、スキンケア成分
(セラミド)^{*}を、皮膚保護剤に配合したのが、
『皮膚保護剤プラス』です。

※スキンケア成分(セラミド)とは
表皮の一番外側、角層の細胞と細胞をつなぐ
角層細胞間脂質のひとつで、皮膚をすこやかに保つ成分です。

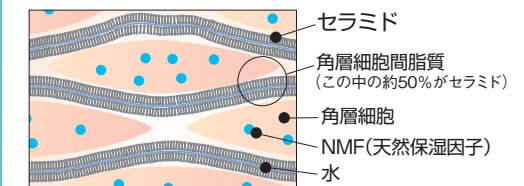

すこやかに、強く、導く。「明日の皮膚力」にプラス。

つねに剥離刺激や汚れにさらされ、皮膚力が弱まりがちなストーマ周囲皮膚の
「明日の皮膚力」を強く、導きます。
さらに、トラブルの起こりにくい、健康な皮膚を保ちます。



^{*}“リモイス”とは、ダメージを受けやすい皮膚へのより積極的なスキンケアを目指した、技術ブランドです。



つねに身につけている装具は、
体を動かせば動かすほど、気になります。
皮膚とのしなやかな一体感が生まれる
『皮膚保護剤プラス』は、いつもぴったり
寄り添うような心地よい装着感で、
のびのびと自由に、体の動きを広げます。



皮膚との一体感で、動き広がる。

皮膚のような心地よい一体感



しなやかな一体感 **プラス皮膚感覚**

初めての柔らかさ、薄さ。
貼った瞬間から、自分の皮膚のような一体感。

中心1.5mm～外縁0.3mmという薄さ。縁が薄いベベルドエッジで、
貼り付け直後から、皮膚にぴったりとなじんで、剥がれにくさも抜群です。
柔軟性に優れ、かがむ・反る・ねじるなどの体の動きに、しなやかにフィット。
面板辺縁が皮膚に食い込むことによる痛みも防ぎます。

漏れ・においも防いで安心。心地よい毎日に。

柔らかかに追従するので、シワにより隙間ができたり、
剥がれたりすることがなく、漏れやにおいをしっかり防止。
ストレスがやわらぎ、つけていることを忘れるような、初めての快適性と安心感です。

しなやかに密着するフレキシコンベックス。

(セルケア1・TDc/Dc キャップ/Uc、セルケア2・Fcに採用)

コンベックスタイプでも、
皮膚感覚の柔らかさを実現。
面板全体の柔軟性により、
凸面がお腹にしなやかに密着し、漏れを防止。
体の動きにもやさしくフィットします。





服を着替える、歯を磨くように、
 日常生活になじんだ動作。
 使いやすいものは手や体の動きによく合い、
 意識しないで使うことができます。
 安心して使いつづけられる
 《セルケアシリーズ》の機能から、
 ゆとりある生活が生まれます。


生活になじみ、ゆとり生まれる。

意識しない使いやすさ


目をつぶっても嵌められる**ピタッと嵌合リング**。(セルケア2全種類に採用)




面板とストーマ袋の嵌合リングを重ね、軽く動かすだけで、位置合わせが簡単に。目で確認しなくても、手の感覚だけで、スッと合わせられます。また、腹部を圧迫せず、ピタッと確実に嵌められます。

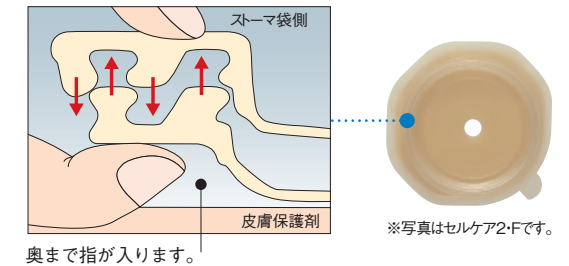

脱臭効果に優れ、目詰まりに強い**通気回復フィルター**。(セルケア1・U/Uc、セルケア2・Uを除く)

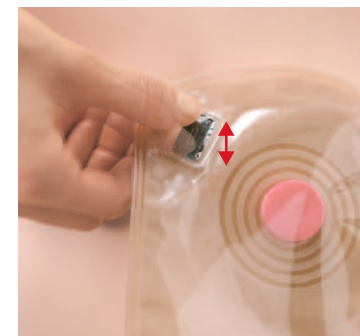


独自の四層構造が、スムーズなガス抜きと高い脱臭効果を持続。さらに、目詰まりしても、フィルターを指で数回つまめば、通気性が回復する新機構を採用。ストーマ袋のふくらみやにおい漏れの心配がありません。

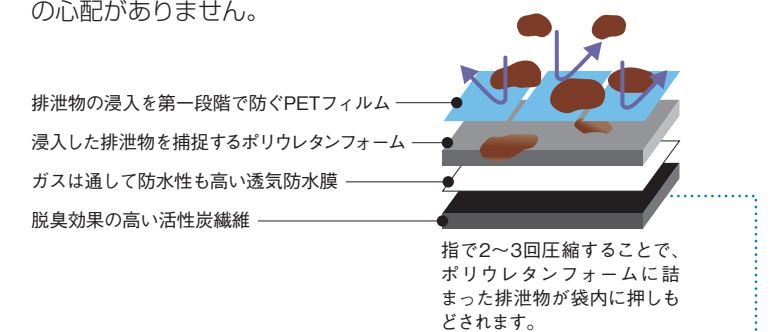

リング溝などに汚れがつきにくい**グルッと汚れよけカバー**。(セルケア2全種類に採用)



ストーマ袋の嵌合リングは、内周に“グルッと汚れよけカバー”をつけた独自の構造。ストーマ袋を外すとき、面板の嵌合リング周囲の排泄物を持ち去るので、嵌合リング周囲に排泄物が残りにくく、溝などに汚れが入り込むのを防ぎます。

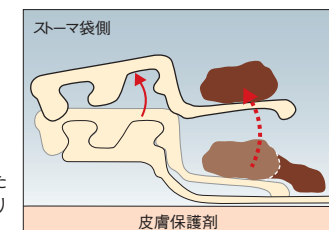

面板の嵌合リング周囲についた排泄物を持ち去るので、汚れが残りにくく、清潔です。



※写真はセルケア2・TDFです。

排出方法を選んで、毎日を快適に。

《セルケアシリーズ》は、排泄物の性状や量に合わせて、適切な排出方法を選択することができます。ストーマ袋形状のバリエーションで、コロストミーからイレオストミー、ウロストミーまで、また排便量の少ない方、細かい手作業の苦手な方まで、適切に対応します。操作性の良いスムーズな排出方法で、オストメイトの快適な生活をサポートします。

下部開放型 クリップ クリップタイプ コロストミー／イレオストミー用

下部に便の排出口がある、下部開放型ストーマ袋です。便が溜まれば排出できるので、排便回数が多い方、また量の多い方向きです。排出口の開閉は簡単なクリップ操作でできます。



排出の際はクリップを外し、ストーマ袋先端に便が付着しないよう排出口を外側に折り返します。下部はフレアー型の形状で、折り返しに便利です。



排出後は折り返しを戻し、またクリップで止めるだけ。簡単な操作で排出終了です。



※写真はセルケア2・DFです。

下部開放型 クリップレスタイプ コロストミー／イレオストミー用

手作業が苦手な方、手指に力のない方でも楽に排出できます。手指に負担をかけない形状保持プレートで、排出の操作は容易に。また密封性を高める4回折り上げが、においや漏れの不安を解消。初めての人でも早期にセルフケアが可能になります。



※写真はセルケア1・TDです。



形状保持プレートをV字に折り曲げると、排出口が開いた状態に保たれ、排出と拭き取りが容易になります。



一定方向へ、青色のラインに沿って折り上げるだけなので、迷わず操作できます。

閉鎖型 コロストミー用



体を動かしている時もストーマ袋が脚に当たりにくく、違和感の少ない形状です。

※写真はセルケア2・CFです。

便排出口のない閉鎖型のストーマ袋です。コロストミーの方で、排便回数が少なく安定している方向きです。毎日交換したい方、排出操作の苦手な方に、体にフィットするコンパクト形状で快適な装着感を提供します。

水様便 排出口具型 ソフト口具タイプ イレオストミー用

水様便～泥状便の方向きのストーマ袋です。キャップ型の排出口やソフトタイプの口具により、外側から圧搾(ミルキング)して排出することができます。目詰まりを防ぎ、オストメイトの不安を解消します。



便に残渣が多いときでも、口具を押してしばらく出すことができます。



口具の上方をカットすれば、下部開放型ストーマ袋として使用できます。



※写真はセルケア1・D キャップです。

尿排出口を二重にロックする ダブルロック口具タイプ ウロストミー用

ダブルロックの排出口で、蓄尿と排尿がより安全に安心して行えるウロストミー用のストーマ袋です。排出の操作もシンプルで確実。高齢の方でも簡単に処理できます。



※写真はセルケア1・Uです。





キャップを外します。(ロックされている状態なので、尿はまだ排出されません)



操作つまみを180°回転させるとロックが解除され、尿が排出されます。

《セルケア®シリーズ》の選び方

ストーマ装具は、ストーマの特徴、排泄物のタイプ・性状、またオストメイト自身の生活習慣や希望などを考慮し選ばれます。《セルケアシリーズ》には、単品系装具(セルケア1)と二品系装具(セルケア2)、また消化管ストーマ用と尿路ストーマ用などをはじめ、さまざまな種類の装具をラインナップしています。下図の流れに沿って、オストメイト一人ひとりに適切なものを選択してください。

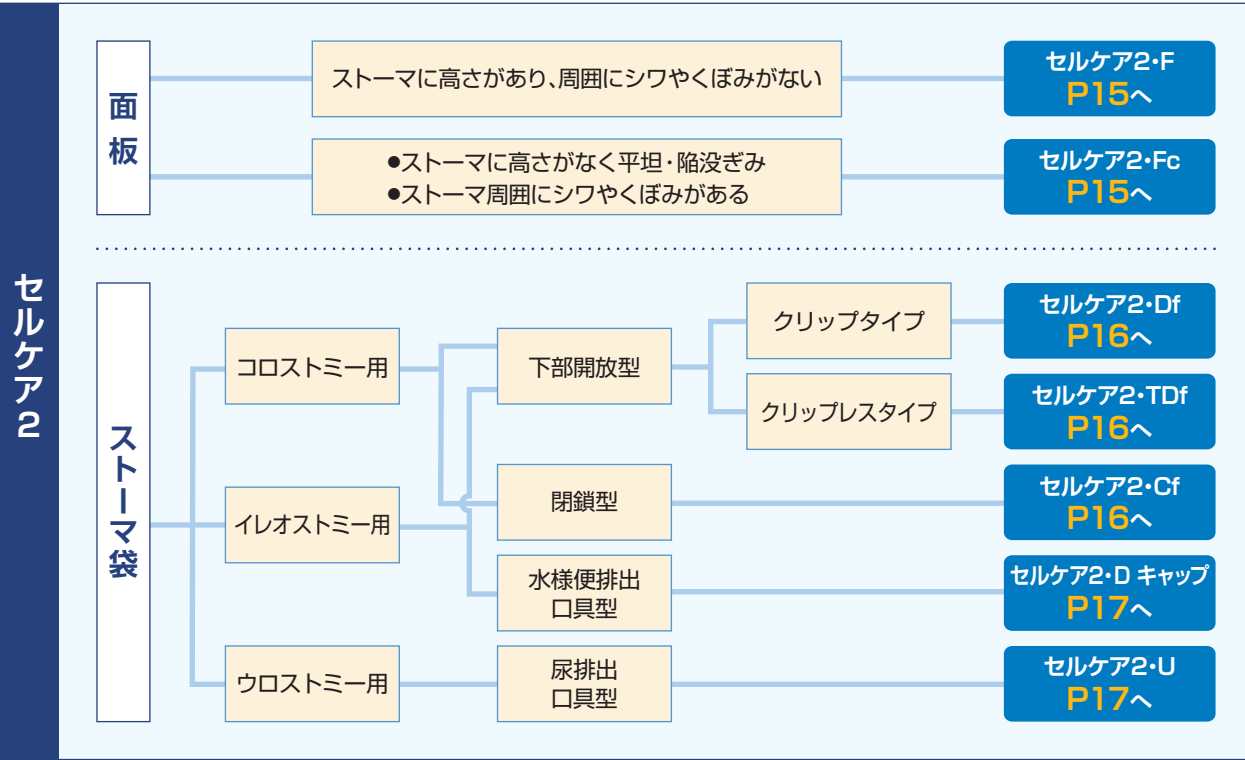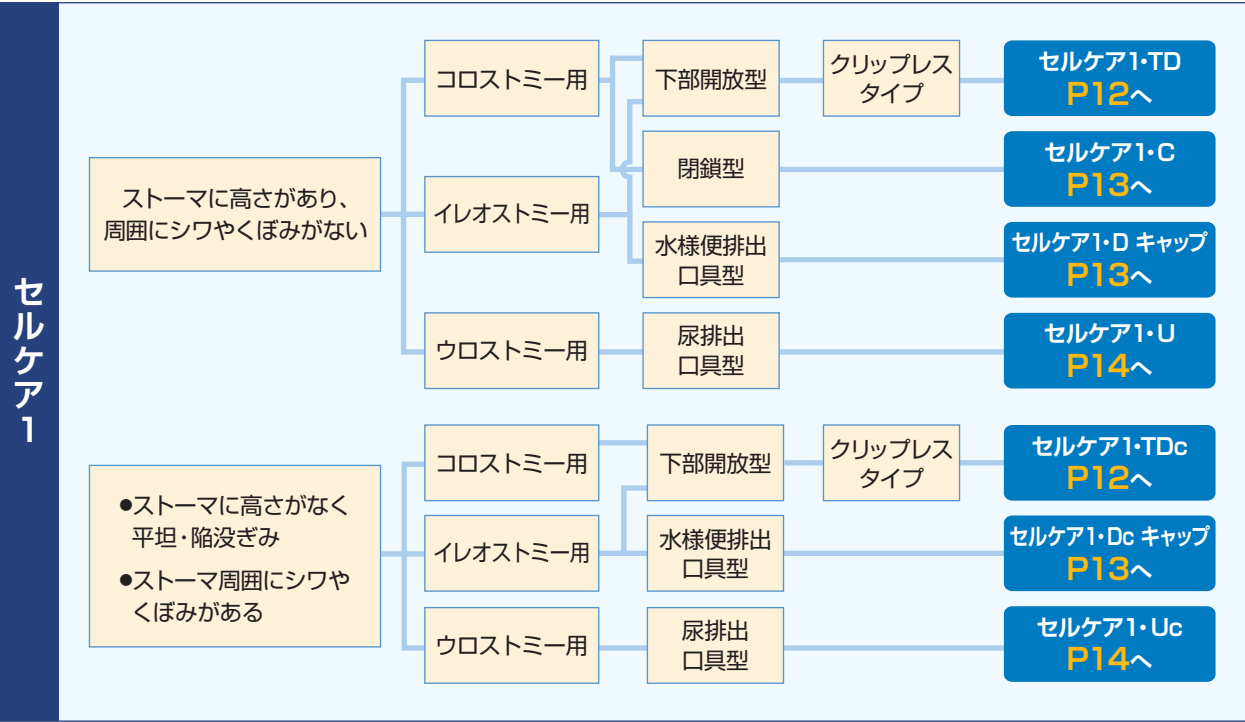

マークの説明

面板：腹部に貼付する部分

- フラット
面板

全体が平らな面板で、高さのあるストーマに適しています。
- 凸型
面板

面板に凸型のプレートが内蔵されており、高さのないストーマに適しています。

ストーマ袋：排泄物を溜める袋

- 下部開放型
クリップ

下部に便排出口があるストーマ袋です。
- 下部開放型
クリップレス

クリップタイプとクリップレスタイプの2種類があります。
- 閉鎖型

便排出口のないストーマ袋です。
- 水様便排出口具型

キャップの開閉で水様便を排出するストーマ袋です。
- 尿排出口具型
ダブル

尿排出口がダブルロックで安心なストーマ袋です。

- 2〜5日交換

1日交換

交換の目安を表します。
- プレカット

ストーマ孔があらかじめカットされており、穴を開ける手間がありません。
- フリーカット

ストーマサイズに合わせて、ハサミなどでストーマ孔を開けて使います。
- 非課税

非課税対象品です。

セルケア1



セルケア®1・TD CELLCARE®1 TD

- 特徴
- クリップレスタイプのため、操作が簡単で装着時の違和感も軽減します。

●においや便モレを防ぎ、目詰まりした場合に機能を回復する“通気回復フィルター”を採用しています。

●面板とストーマ袋が一体になっているので、装着時の違和感も軽減します。
- このような方に
- 細かい作業が苦手な方

●排便回数が多め(1日3回以上)の方

- フラット
面板

下部開放型
クリップレス

2〜5日交換
プレカット
フリーカット

種類	商品コードNO.	規 格			1函入数	メーカー希望小売価格
		穴の大きさ	ストーマ有効径	袋サイズ(縦×横)		
肌色	19421	20mmφ	14~49mm(フリーカット)	300mm×150mm	10枚	¥6,000
20フリー	18701	20mmφ	14~49mm(フリーカット)			
25	18702	25mmφ	19~24mm			
30	18703	30mmφ	24~29mm			
35	18704	35mmφ	29~34mm			
40	18705	40mmφ	34~39mm			



セルケア®1・TDc CELLCARE®1 TDc

- 特徴
- クリップレスタイプのため、操作が簡単で装着時の違和感も軽減します。

●においや便モレを防ぎ、目詰まりした場合に機能を回復する“通気回復フィルター”を採用しています。

●面板とストーマ袋が一体になっているので、装着時の違和感も軽減します。
- このような方に
- 平坦、陥没ぎみ等、高さのないストーマの方

●ストーマ周囲にシワ等があり、フラット面板ではモレやすい方


●排便回数が多め(1日3回以上)の方

- 凸型
面板

下部開放型
クリップレス

2〜5日交換
プレカット

種類	商品コードNO.	規 格			1函入数	メーカー希望小売価格
		穴の大きさ	ストーマ有効径	袋サイズ(縦×横)		
22	18711	22mmφ	18~21mm	300mm×150mm	5枚	¥4,750
25	18712	25mmφ	21~24mm			
28	18713	28mmφ	24~27mm			
32	18714	32mmφ	27~31mm			
36	18715	36mmφ	31~35mm			
40	18716	40mmφ	35~39mm			

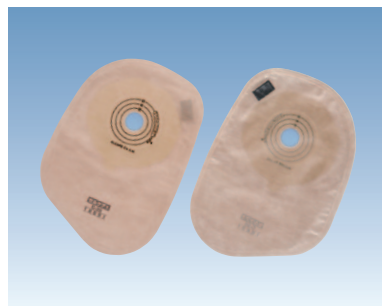

セルケア[®]1・C CELLCARE[®]1 C

■特徴

- においや便モレを防ぎ、目詰まりした場合に機能を回復する“通気回復フィルター”を採用しています。
- 面板とストーマ袋が一体になっているので、装着時の違和感も軽減します。

■このような方に

- 毎日交換をお望みの方
- 排便回数が少ない方や洗腸後などの排便量の少ない方

▶ 非課税

種類	商品コードNO.	規 格			1函入数	メーカー希望小売価格
		穴の大きさ	ストーマ有効径	袋サイズ(縦×横)		
20フリー	18691	20mmφ	14～49mm(フリーカット)	210mm×150mm	10枚	¥3,500

フラット
面板

閉鎖型

- 1日交換
- フリーカット



セルケア[®]1・U CELLCARE[®]1 U

■特徴

- 面板とストーマ袋が一体になっているので、装着時の違和感も軽減します。
- ダブルロック口具により、レッグバッグや採尿バッグの接続もスムーズです。

▶ 非課税

種類	商品コードNO.	規 格			1函入数	メーカー希望小売価格
		穴の大きさ	ストーマ有効径	袋サイズ(縦×横)		
10フリー	18721	10mmφ	4～49mm(フリーカット)	260mm×150mm	10枚	¥8,000
20	18722	20mmφ	14～19mm			
25	18723	25mmφ	19～24mm			
30	18724	30mmφ	24～29mm			
35	18725	35mmφ	29～34mm			
40	18726	40mmφ	34～39mm			

フラット
面板尿排出
口具型
ダブル

- 2～5日交換
- プレカット
- フリーカット



セルケア[®]1・D キャップ CELLCARE[®]1 D CAP

■特徴

- ソフトタイプの口具により、水様便～泥状便の場合でも、外部から圧搾(ミルキング)して排出することができます。
- においや便モレを防ぎ、目詰まりした場合に機能を回復する“通気回復フィルター”を採用しています。

■このような方に

- 水様便～泥状便の方
- やせた方(硬い腹壁にも柔軟に追従)

▶ 非課税

種類	商品コードNO.	規 格			1函入数	メーカー希望小売価格
		穴の大きさ	ストーマ有効径	袋サイズ(縦×横)		
肌色	19431	20mmφ	14～49mm(フリーカット)	346mm×148mm	10枚	¥8,500
20フリー	18921	20mmφ	14～49mm(フリーカット)			
25	18922	25mmφ	19～24mm			
30	18923	30mmφ	24～29mm			
35	18924	35mmφ	29～34mm			
40	18925	40mmφ	34～39mm			
70フリー	18926	10mmφ	4～69mm(フリーカット)			¥9,500

フラット
面板水様便
排出
口具型

- 2～5日交換
- プレカット
- フリーカット



セルケア[®]1・Uc CELLCARE[®]1 Uc

■特徴

- ストーマに高さをもたせ、排泄物のモレを防ぐ凸面タイプの面板を使用しています。
- ダブルロック口具により、レッグバッグや採尿バッグの接続もスムーズです。

■このような方に

- 平坦、陥没ぎみ等、高さのないストーマの方
- ストーマ周囲にシワ等があり、フラット面板ではモレやすい方

▶ 非課税

種類	商品コードNO.	規 格			1函入数	メーカー希望小売価格
		穴の大きさ	ストーマ有効径	袋サイズ(縦×横)		
13	18731	13mmφ	9～12mm	260mm×150mm	5枚	¥5,500
16	18732	16mmφ	12～15mm			
19	18733	19mmφ	15～18mm			
22	18734	22mmφ	18～21mm			
25	18735	25mmφ	21～24mm			
28	18736	28mmφ	24～27mm			
32	18737	32mmφ	27～31mm			

凸型
面板尿排出
口具型
ダブル

- 2～5日交換
- プレカット



セルケア[®]1・Dc キャップ CELLCARE[®]1 Dc CAP

■特徴

- ソフトタイプの口具により、水様便～泥状便の場合でも、外部から圧搾(ミルキング)して排出することができます。
- においや便モレを防ぎ、目詰まりした場合に機能を回復する“通気回復フィルター”を採用しています。

■このような方に

- 水様便～泥状便の方
- 平坦、陥没ぎみ等、高さのないストーマの方

▶ 非課税

種類	商品コードNO.	規 格			1函入数	メーカー希望小売価格
		穴の大きさ	ストーマ有効径	袋サイズ(縦×横)		
22	18931	22mmφ	18～21mm	346mm×148mm	5枚	¥5,500
25	18932	25mmφ	21～24mm			
28	18933	28mmφ	24～27mm			
32	18934	32mmφ	27～31mm			
36	18935	36mmφ	31～35mm			
40	18936	40mmφ	35～39mm			

凸型
面板水様便
排出
口具型

- 2～5日交換
- プレカット



固定ベルト TRUNK BELT

■特徴

- 面板の密着性を高め、体動によるズレやハガレを防止します。
- 面板が密着しにくい方、スポーツ等動きが大きい方に最適です。

種類	商品コードNO.	規 格	入数	メーカー希望小売価格(税抜き)
—	12671	胴回(適応目安)60～110cm (穴径63mmφ)	1セット	¥1,650

適応商品:セルケア1・TD/C/D キャップ/U



ユー케어[®]胴ベルト YOUCARE[®] TRUNK BELT

■特徴

- 面板の密着性を高め、体動によるズレやハガレを防止します。
- 面板が密着しにくい方、スポーツ等動きが大きい方に最適です。

種類	商品コードNO.	規 格	入数	メーカー希望小売価格(税抜き)
—	15091	胴回(適応目安)60～110cm	1コ	¥1,100

適応商品:セルケア1・TDc/Dcキャップ/Uc

セルケア2 面板


セルケア[®]2・F CELLCARE[®]2 F

■特徴

- 柔らかく薄い皮膚保護剤で、しなやかに肌にフィットします。
- コロストミー、イレオストミー、ウロストミー兼用です。
- 面板の密着性を高めたい場合は、固定ベルト・Ⅱ(P18)が使用できます。

■このような方に

- ストーマに高さがある方

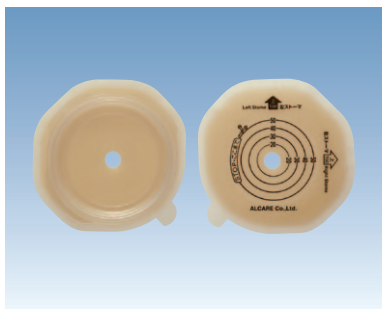フラット
面板

- 2～5日交換
- フレカット
- フリーカット

▶ 非課税

種類	商品 コードNO.	規 格				1函入数	メーカー希望小売価格
		穴の大きさ	ストーマ有効径	面板サイズ	適応ストーマ袋		
Mフリー	18251	10mmφ	4～39mm(フリーカット)	88mm×88mm	M	5枚	¥4,250
M16	18661	16mmφ	12～15mm				
M19	18662	19mmφ	15～18mm				
M22	18252	22mmφ	18～21mm				
M25	18253	25mmφ	21～24mm				
M28	18254	28mmφ	24～27mm				
Lフリー	18255	10mmφ	4～49mm(フリーカット)	98mm×98mm	L	5枚	¥4,250
L32	18256	32mmφ	27～31mm				
L36	18257	36mmφ	31～35mm				
L40	18258	40mmφ	35～39mm				
LLフリー	18259	10mmφ	4～69mm(フリーカット)	118mm×118mm	LL	5枚	¥4,750


セルケア[®]2・Fc CELLCARE[®]2 Fc

■特徴

- ストーマに高さをもたせ、排泄物のモレを防ぐコンベックスプレートが内蔵されています。
- コロストミー、イレオストミー、ウロストミー兼用です。
- 柔らかい面板で、しなやかに肌にフィットします。
- 面板の密着性を高めたい場合は、固定ベルト・Ⅱ(P18)が使用できます。

■このような方に

- 平坦、陥没ぎみ等、高さがないストーマの方
- ストーマ周囲にシワ等があり、フラット面板ではモレやすい方

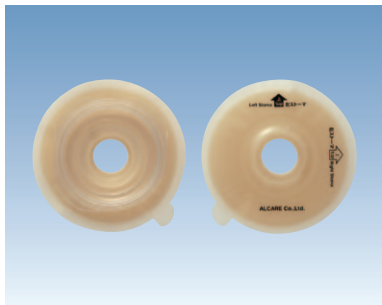凸型
面板

- 2～5日交換
- フレカット

▶ 非課税

種類	商品 コードNO.	規 格				1函入数	メーカー希望小売価格
		穴の大きさ	ストーマ有効径	面板サイズ	適応ストーマ袋		
M13	18387	13mmφ	9～12mm	100mmφ	M	5枚	¥5,500
M16	18388	16mmφ	12～15mm				
M19	18389	19mmφ	15～18mm				
M22	18381	22mmφ	18～21mm				
M25	18382	25mmφ	21～24mm				
M28	18383	28mmφ	24～27mm				
L32	18384	32mmφ	27～31mm	110mmφ	L	5枚	¥5,500
L36	18385	36mmφ	31～35mm				
L40	18386	40mmφ	35～39mm				

セルケア2 ストーマ袋

セルケア[®]2・Df CELLCARE[®]2 Df

■特徴

- においや便モレを防ぎ、目詰まりした場合に機能を回復する“通気回復フィルター”を採用しています。
- ストーマ袋を外すとき、面板の嵌合リング周囲についた排泄物を持ち去るので、汚れが残りにくく、清潔です。

■このような方に

- 排便回数が多め(1日3回以上)の方

▶ 非課税

下部
開放型
クリップ

種類	商品 コードNO.	規 格	1函入数	メーカー希望小売価格
		袋サイズ(縦×横)		
M	18271	300mm×150mm	10枚	¥2,800
L	18272	300mm×150mm	10枚	¥2,800
LL	18273	300mm×150mm	10枚	¥3,200

セルケア[®]2・TDf CELLCARE[®]2 TDf

■特徴

- クリップレスタイプのため、操作が簡単で装着時の違和感も軽減します。
- においや便モレを防ぎ、目詰まりした場合に機能を回復する“通気回復フィルター”を採用しています。
- ストーマ袋を外すとき、面板の嵌合リング周囲についた排泄物を持ち去るので、汚れが残りにくく、清潔です。

■このような方に

- 細かい作業が苦手な方
- 排便回数が多め(1日3回以上)の方

▶ 非課税

下部
開放型
クリップレス

種類		商品 コードNO.	規 格	1函入数	メーカー希望小売価格
			袋サイズ(縦×横)		
透明	M	18261	300mm×150mm	10枚	¥3,500
	L	18262	300mm×150mm	10枚	¥3,500
	LL	18263	300mm×150mm	10枚	¥4,000
肌色	M	18671	300mm×150mm	10枚	¥3,500
	L	18672	300mm×150mm	10枚	¥3,500

セルケア[®]2・Cf CELLCARE[®]2 Cf

■特徴

- においや便モレを防ぎ、目詰まりした場合に機能を回復する“通気回復フィルター”を採用しています。
- ストーマ袋を外すとき、面板の嵌合リング周囲についた排泄物を持ち去るので、汚れが残りにくく、清潔です。

■このような方に

- 洗腸後などの排便量の少ない方
- 排便回数が少なく(1日1～2回)、安定している方

▶ 非課税



閉鎖型

種類	商品 コードNO.	規 格	1函入数	メーカー希望小売価格
		袋サイズ(縦×横)		
M	18281	210mm×150mm	10枚	¥2,500
L	18282	210mm×150mm	10枚	¥2,500



水様便
排出
口具型

セルケア[®]2・D キャップ CELLCARE[®] 2 D CAP

■特徴

- ソフトタイプの口具により、水様便～泥状便の場合でも、外部から圧搾(ミルキング)して排出することができます。
- においや便モレを防ぎ、目詰まりした場合に機能を回復する“通気回復フィルター”を採用しています。

■このような方に

- 水様便～泥状便の方

▶ 非課税

種類		商品 コードNO.	規 格	1函入数	メーカー希望小売価格
			袋サイズ(縦×横)		
透明	M	18911	346mm×148mm	10枚	¥5,500
	L	18912	346mm×148mm	10枚	¥5,500
	LL	18913	346mm×148mm	10枚	¥6,000
肌色	M	19441	346mm×148mm	10枚	¥5,500
	L	19442	346mm×148mm	10枚	¥5,500



尿排出
口具型
ダブル

セルケア[®]2・U CELLCARE[®] 2 U


■特徴

- ダブルロック口具により、レッグバッグや採尿バッグの接続もスムーズです。

▶ 非課税

種類	商品 コードNO.	規 格	1函入数	メーカー希望小売価格
		袋サイズ(縦×横)		
M	18681	260mm×150mm	10枚	¥5,500
L	18682	260mm×150mm	10枚	¥5,500

アクセサリ

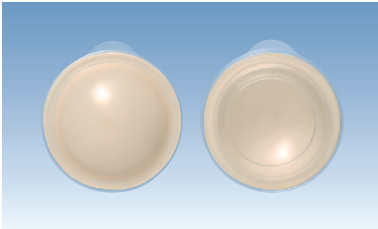

閉鎖型


セルケア[®]2・BC CELLCARE[®] 2 BC

■特徴

- コンパクトなドーム型のため、入浴や水泳などに最適です。
- プラスチック製で水分が拭き取りやすく、耐久性にも優れています。

▶ 非課税

種類	商品 コードNO.	規 格	1函入数	メーカー希望小売価格
		ドーム高さ		
M	18291	20mm	2コ	¥900
L	18292	20mm	2コ	¥900

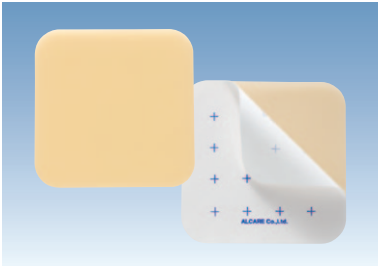


セルケア[®]・ウエハー CELLCARE[®] WAFER

■特徴

- スキンケア成分(セラミド)を配合した、ウエハー状皮膚保護剤です。
- 型崩れせず、しなやかに皮膚にフィットし、シワやくぼみを補正します。

種類	商品 コードNO.	規 格	1函入数	メーカー希望小売価格 (税抜き)
		縦×横		
10号	18391	100mm×100mm	5枚	¥3,500

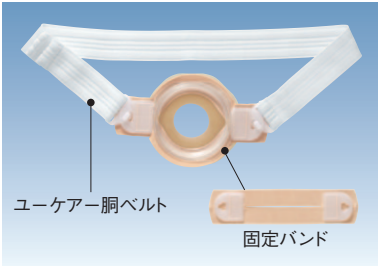

(注)固定ベルト・IIには、面板は含まれていません。

固定ベルト・II TRUNK BELT-II

■特徴

- 伸縮性のある柔らかい固定バンドにより、自然な装着感が得られます。
- 面板全体を押さえ、密着性を高めます。

種類	商品 コードNO.	規 格 (セット内容)	入数	メーカー希望小売価格 (税抜き)
—	18061	ユーケアー胴ベルト:1コ 固定バンド:2コ	1セット	¥2,400

適応商品:セルケア2・F(LLを除く)／Fc

【別売部品】

品名	商品 コードNO.	規 格	入数	メーカー希望小売価格 (税抜き)
ユーケアー胴ベルト	15091	胴回(適応目安)60～110cm	1コ	¥1,100
固定バンド	18071	—	2コ	¥1,320