


使用方法

滴下ボトル


- ① ストーマ装具または粘着製品の端部にはくり液を滴下すると、端部を容易にめくり上げることができます。
- ② 皮膚と粘着剤の隙間にはくり液を滴下しながら剥離します。

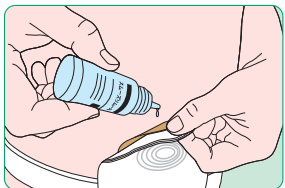

- ③ 剥離後、皮膚表面に残ったはくり液はティッシュペーパーなどで除去してください。
- ④ ストーマ装具や粘着製品を貼付する場合は、はくり液が完全に乾いてからご使用ください。
- ⑤ 使用後は、キャップをしっかりと閉めて、箱に入れ、立てた状態で保管してください。

ワイブシート

- ① アルミバックの切り込み部より開封し、シートを手で取り出します。
※アルミバック開封後、開封部を下に向けるとはくり液が流れ出る場合がありますので、ご注意ください。
- ② ストーマ装具または粘着製品の端部からはくり液を染み込ませると、端部を容易にめくり上げることができます。
- ③ 皮膚と粘着剤の隙間にはくり液を染み込ませながら剥離します。

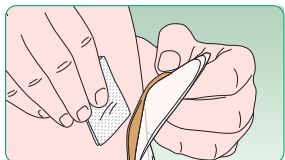

- ④ 剥離後、皮膚表面に残ったはくり液はティッシュペーパーなどで除去してください。
- ⑤ ストーマ装具や粘着製品を貼付する場合は、はくり液が完全に乾いてからご使用ください。
※ワイブシートは1回使い切りタイプです。使用後は、捨ててください。
※ワイブシートは水に溶けませんので、トイレには流さないでください。

このような場合には

ストーマ装具や、粘着製品の一部分が皮膚に残った場合は、ティッシュペーパーなどにはくり液を含浸させたもの、もしくは、新しいワイブシートで愛護的に拭き取ってください。



スムーズリムーバー® Smooth Remover

種類	商品コード No.	規格 (内容量)	1函入数	メーカー希望小売価格(税込)
滴下ボトル	19811	30mL	1本	¥1,320
ワイブシート (20枚入り)	19812	4mL / 枚	20枚	¥1,650
ワイブシート (50枚入り)	19813	4mL / 枚	50枚	¥4,125

使用上のご注意

⚠ 警 告

- 本品は可燃性の液体を含みます。ご使用の際は、通気の良い場所で使用し、火気、熱源に近づけないでください。静電気、火花にもご注意ください。引火のおそれがあります。
- 傷や腫れ物、湿疹など、皮膚に異常のある部位には使用しないでください。
- 発赤やかゆみ、刺激などの異常が生じた場合には、直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。使い続けると悪化することがあります。
- 目、鼻、口などに入らないように注意してください。万が入った場合は直ちに多量の水でよく洗い流し、医師にご相談ください。
- 廃棄の際は、中身を使い切ってから廃棄してください。

注 意

- はくり液は揮発性が高いので、滴下ボトル使用後はキャップをしっかりと閉めてください。

保管上のご注意

- 火気、直射日光を避け、室温で保管してください。
- 乳幼児、小児の手の届かない所に保管してください。

火気厳禁 第4類第一石油類 危険等級Ⅱ

成分：ヘキサメチルジシロキサン、脂肪酸エステル



アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013
www.alcare.co.jp

お問い合わせ：コールセンター

フリーダイヤル **0120-770-863** 土・日・祝日を除く
午前9:00～午後5:00

- 本カタログの内容は2025年3月現在のものです。
- 商品の仕様、デザインおよび価格は、改良や経済状況の変動などにより予告なく変更することがあります。
- 本カタログに掲載の写真は、実際の色とは多少異なる場合がありますので、ご了承ください。

ALCARE

つながりあて、ひらくケア。

スムーズリムーバー® Smooth Remover



スルスルはがせて
ベタつかない、
使いやすい剥離剤。
はくり液

粘着剥離剤(非アルコール性)
Adhesive Remover (Alcohol Free)

www.alcare.co.jp

454-0617-0325/5

皮膚にやさしい、サラッと剥離。^{はく り}

糊残りが少なく、ストーマ装具をスルスルと簡単にはがすことができます。
速乾性でべたつきの少ない、サラッとした使い心地の非アルコール性の剥離剤です。

■はがれ方の比較

はくり液が皮膚と皮膚保護剤のすき間にすばやく浸透し、スルスルと簡単にはがすことができます。




未使用
皮膚が引っ張られながらはがれる



《スムーズリムーバー》使用
皮膚が引っ張られずにスルスルはがれる

■はがした後の角質のはがれを比較(当社比)

角質を赤く染める角質染色剤で、皮膚からはがした面に付着した角質を染色しました。何も使わずにはがした場合と比べて、《スムーズリムーバー》を使った場合は、赤くならず、より角質のはがれにくい(より皮膚を傷めない)ことがわかりました。

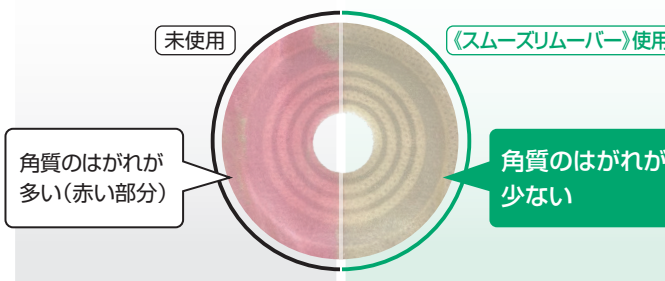

未使用
角質のはがれが多い(赤い部分)

《スムーズリムーバー》使用
角質のはがれが少ない

※面写真(緊急時を想定して貼付4時間後にはがしたもののしたもの。
成人被験者3名の腹部に貼付後、剥離した結果の一例。アルケア医工学研究所調べ)

滴下ボトル

使いやすい

細長いノズルが、ストーマ装具の面板と皮膚の接着面の近くまで届くため、狙ったところへ簡単に滴下できます。



細長いノズルで奥まで届く

わかりやすい

ボトル内の液の動きが見えるため、滴下のタイミングや残量がわかりやすくなっています。



液の動きが見える



ワイプシート

コシがあり、ヨレにくい

ワイプシートに適度なコシがあり、使用時にヨレにくいので、ストーマ装具と皮膚の境に的確にシートをあてながら剥離できます。



適度なコシで境目にあてやすい

液量たっぷり4mL

たっぷり4mLのはくり液を含んだワイプシート1枚で、面板1枚をはがせます。

※大きなサイズの面板(面積が130cm²を超える面板)の場合は、はがしきれない場合もあります。



イメージ

はくり液総量：4mL