



スムーズリムーバー® Smooth Remover

種類	商品コードNo.	規格 (内容量)	1函入数
滴下ボトル	19811	30mL	1本
ワイプシート (20枚入り)	19812	4mL / 枚	20枚
ワイプシート (50枚入り)	19813	4mL / 枚	50枚

使用上のご注意

⚠ 警 告

- 本品は可燃性の液体を含みます。ご使用の際は、通気の良い場所で使用し、火気、熱源に近づけないでください。静電気、火花にもご注意ください。引火のおそれがあります。
- 傷や腫れ物、湿疹など、皮膚に異常のある部位には使用しないでください。
- 発赤やかゆみ、刺激などの異常が生じた場合には、直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。使い続けると悪化することがあります。
- 目、鼻、口などに入らないように注意してください。万一入った場合は直ちに多量の水でよく洗い流し、医師にご相談ください。
- 廃棄の際は、中身を使い切ってから廃棄してください。

注 意

- はくり液は揮発性が高いため、滴下ボトル使用後はキャップをしっかりと閉めてください。

保管上のご注意

- 火気、直射日光を避け、室温で保管してください。
- 乳幼児、小児の手の届かない所に保管してください。

火気厳禁 第4類第一石油類 危険等級II

成分：ヘキサメチルジシロキサン
脂肪酸エステル

ALCARE

つなぐ手あて、ひらくケア。

スムーズリムーバー® Smooth Remover



皮膚にやさしく、使いやすい。
強粘着テープの剥離作業も
よりスムーズに。

粘着剥離剤(非アルコール性)
Adhesive Remover (Alcohol Free)

お問い合わせ：コールセンター

フリーダイヤル **0120-770-863**

土・日・祝日を除く
午前 9：00～午後 5：00

ALCARE

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013
www.alcare.co.jp

- 本カタログの内容は2025年3月現在のものです。
- 商品の仕様、デザインおよび価格は、改良や経済状況の変動などにより予告なく変更することがあります。
- 本カタログに掲載の写真は、実際の色とは多少異なる場合がありますので、ご了承ください。



この印刷物は、EPAのシリアル基準に適合した
地球環境にやさしい印刷方法で作成されています
EPA：環境保護印刷推進協議会
<http://www.e3pa.com>

www.alcare.co.jp

《スムーズリムーバー[®]》 シリコン系の粘着剥離剤(非アルコール性)

固定テープの交換における剥離～再固定を滞らせない。 看護に寄り添った剥離剤のワイプシート。

チューブカテーテルの固定テープ交換など、繊細で滞りない作業が要求される剥離の現場をサポートします。



こんな経験ありませんか？

- ▶ 剥離液がなくなりすぐカサカサになる
- ▶ ワイプが柔らかくて思ったところに剥離液が届かないから1枚ではがしきれず、何枚も必要で作業が滞る
- ▶ 剥離液のオイルがベタベタしてテープの再固定がしにくい

スムーズリムーバー ワイプシートなら！

① 1つのパッケージで十分な剥離操作

- 剥離液総量4mL
・ワイプに剥離液がたっぷり含浸
- 粘着柔軟化成分配合により液持ちがよい

① スムーズで効率的な剥離操作

- ワイプシートに適度なコシがありヨレにくい
- テープと皮膚の剥離境界を狙いやすく無駄な液ダレも防げる



イメージ (実物大)

① 剥離後のテープ再固定をさまたげない

- シリコン系剥離液により、ベタつきの少ないサラッとした使用感



スムーズリムーバー[®]
Smooth Remover

粘着剥離剤(非アルコール性)
Adhesive Remover (Alcohol Free)

こだわりの剥離液設計

非アルコール性・シリコン系剥離液+粘着柔軟化成分 + 液量4mL



こんな経験ありませんか？


- ▶ テープの剥離刺激で患者さんに「痛い！」と疼痛を訴えられる
- ▶ テープの剥離刺激により皮膚が赤くなる(発赤)
- ▶ テープテアの発生

スムーズリムーバー ワイプシートなら！

① 強粘着テープもやさしく剥離

- 粘着柔軟化成分が剥離作用のあるシリコンオイルの浸透を助ける
- 皮膚へのダメージを軽減

【スムーズリムーバーの剥離機序(イメージ図)】

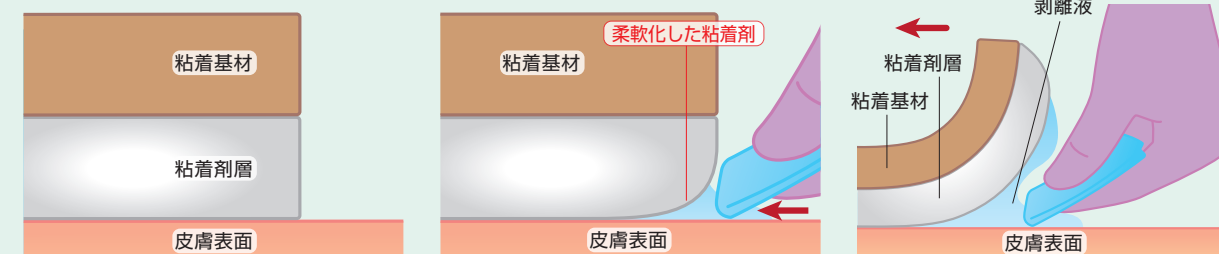


テープがはがしづらいのは、粘着剤が皮膚と固着しているためです。

粘着柔軟化成分が粘着剤を柔軟化して、剥離成分であるシリコンオイルがいきわたる隙間を作り剥離を助けます。

剥離液がいきわたり、固着してはがしづらいテープもはがしやすくなります。

■はがした後の角質のはがれを比較(当社比)

角質を赤く染める染色剤にて角質を染色しました。成人被験者2名の前腕内側部に3枚ずつテープを3時間貼付後、剥離した結果の一例です。何も使わずにはがした場合と比べて、《スムーズリムーバー》を使った場合は、赤くならず、より角質のはがれにくい(より皮膚を傷めない)ことがわかりました。(アルケア医工学研究所調べ)

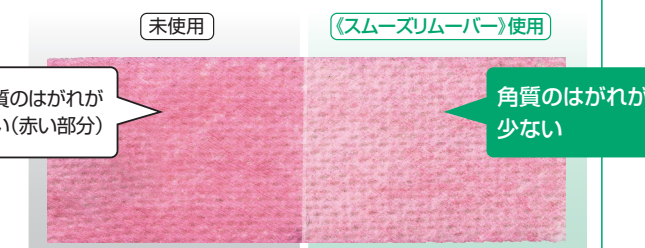

角質のはがれが多い(赤い部分)

角質のはがれが少ない

固定管理のトラブル回避を、剥離から。

剥離による皮膚ダメージと、剥離作業による業務の滞りを気にせず、適切な固定の選択を。アルケアは、皮膚にやさしく使いやすい剥離剤で、デバイス管理をサポートし、皮膚ダメージの低減を目指します。