



皮膚への密着による固定と 低剥離刺激を両立

生体適合性の高いシリコンを用い、皮膚への密着による固定と低剥離刺激を両立したアルケア独自の技術です。

アドプロテープ®・クッション Adprotape Cushion

種類	商品コード No.	規格	1箱入数	メーカー希望 小売価格 (本体価格)
W10	21341	10.0cm×2m	1巻	¥4,070 (¥3,700)
W5	21342	5.0cm×2m	1巻	¥3,080 (¥2,800)
W2.5	21343	2.5cm×2m	2巻	¥3,080 (¥2,800)

■使用上の注意


△警告

- ・本品は医療機器ではありません、直接創部には貼らないでください。
- ・脆弱な状態の皮膚には貼付しないでください。
- ・口や鼻の周囲に使用する場合は、本品がしっかり貼り付けられ、剥がれないか頻りに確認してください。〔脱落によって本品の誤飲や窒息のおそれがある〕


使用方法

- ・本品は箱に入れてお使いください。
- ・貼付部位の水気、油分をよく取ってご使用ください。
- ・本品を剥がす際は、皮膚が変形しないように皮膚を押さえテープに対して180°の方向にゆっくり剥がしてください。


■テープの取り出し方

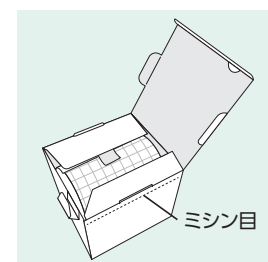

① 箱の正面にはミシン目が付いています。

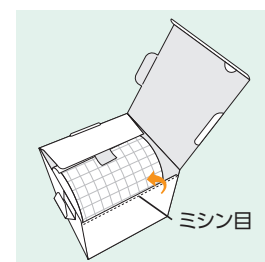

② ミシン目を内側へ折ります。

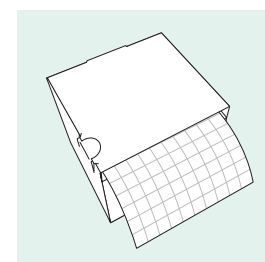

③ テープを引き出してご使用ください。

ALCARE

つながりあて、ひらくケア。



アドプロテープ®・クッション Adprotape Cushion



「思いどおりに使える。」
守りたい皮膚に貼れる、
ハサミで加工しやすいテープ。

クッション付きシリコンゲルテープ Cushioned Silicone Gel Tape

ALCARE

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013
www.alcare.co.jp

お問い合わせ：コールセンター

フリーダイヤル **0120-770-863** 土・日・祝日を除く
午前9:00～午後5:00

●本カタログの内容は2025年2月現在のものです。
●商品の仕様、デザインおよび価格は、改良や経済状況の変動などにより予告なく変更することがあります。
●本カタログに掲載の写真は、実際の色とは多少異なる場合がありますので、ご了承ください。



この印刷物は、EPAのシルバー・基準に適合した
地球環境にやさしい印刷方法で作成されています
EPA:環境保護印刷推進協議会
http://www.ejpa.com

《アドプロテープ®・クッション》クッション付きシリコーンゲルテープ

皮膚にやさしく、思いどおりに使える。

皮膚にやさしいクッション付きシリコーンゲルテープ アドプロテープ・クッションは、
除圧したい場所に合わせてカットして貼るだけのシンプルケアで看護業務をサポートします。


準備

● 用途に合わせて選べる便利な3サイズ展開

2.5cm、5cm、10cm幅の3サイズ展開のため、狭い幅の貼付シーンでも、
カットの手間を軽減できます。

● 自由に加工できる ロール形状

テープを化粧箱から引き出し、必要分をハサミで加工
できます。

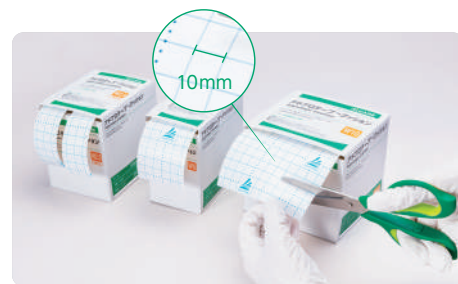

こんな「あるある」も解消

毎回のカットの手間が面倒…
余分なカット片が出る…





→必要なサイズに無駄なく、また手間を削減
して加工ができるため経済的！

貼付時

● 通気性


粘着層の孔開け設計と通気性に優れたポリウレタン
フォーム素材で、蒸れにくく様々なシーンで使用できます。

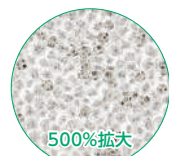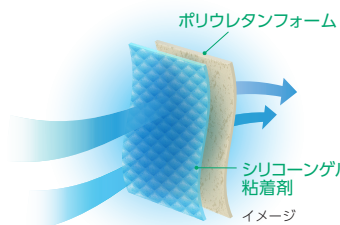

粘着層の拡大写真です。
薄く白濁している部分が粘着層です。

● 追従性

柔軟性の高いポリウレタン
フォームを採用し、屈曲部位
にも追従する設計であるため、
屈曲が多い耳介部にも
密着します。

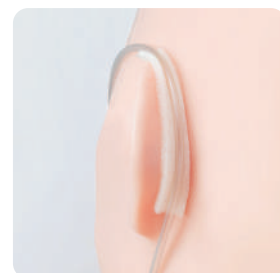


● 除圧性


3mm厚のポリウレタンフォームを使用し、皮膚にかかる
外部からの圧迫を低減します。

圧力分散性

アドプロテープ・クッションの使用により圧が分散されています。

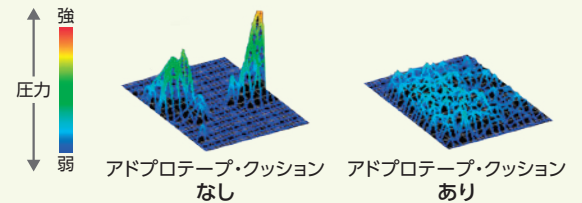

試験方法：重荷600gを乗せ5分間圧迫した時の圧力分散を測定。〔アドプロテープ・クッション
あり〕では10cm×10cmのアドプロテープ・クッションを1枚使用（自社調べ）

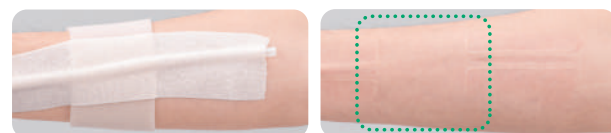


腕にカテーテルをサージカルテープで3時間固定し、アドプロテープ・クッションの
除圧性を簡易的に実験した結果です。

剥離時

● 低剥離刺激

低剥離刺激なシリコーンゲル粘着剤を採用することで、剥離時の皮膚刺激を軽減します。
当社独自の技術であるマイルドピール技術を採用しています。

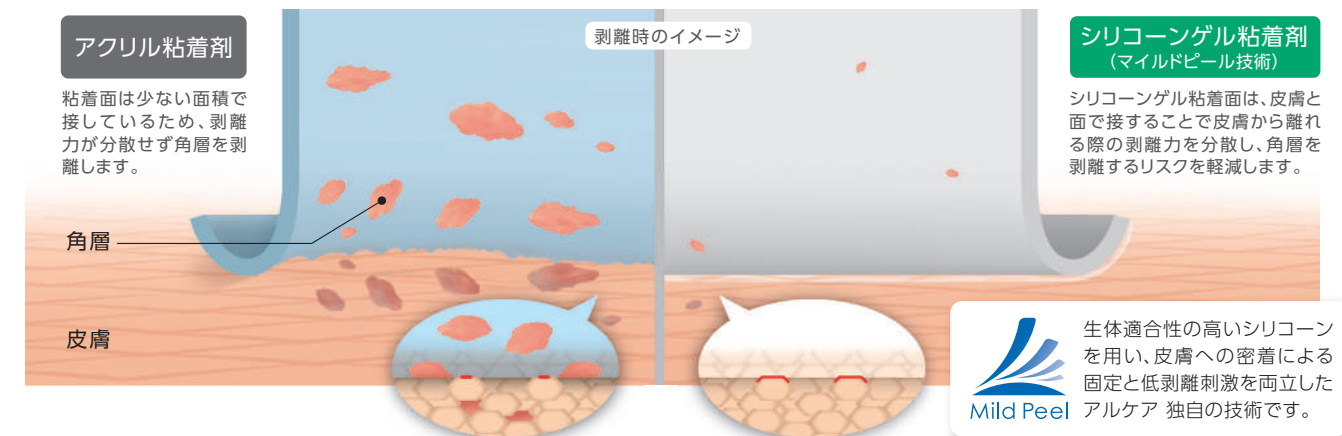

シリコーンゲル粘着剤 (マイルドピール技術)


シリコーンゲル粘着剤は、皮膚と
面で接することで皮膚から離れ
る際の剥離力を分散し、角層を
剥離するリスクを軽減します。




生体適合性の高いシリコーン
を用い、皮膚への密着による
固定と低剥離刺激を両立した
アルケア 独自の技術です。

使用例

医療用マスク

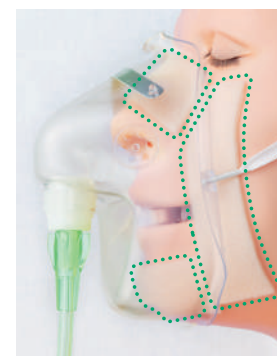

着圧ストッキング

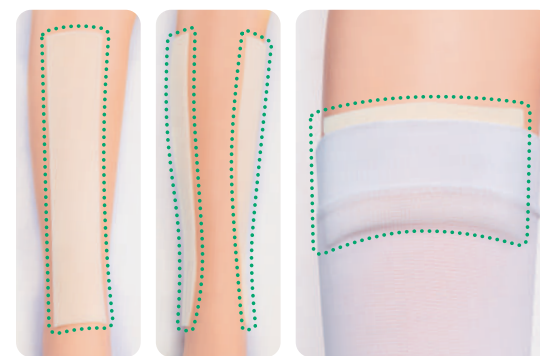

チューブ・カテーテル

