

入院中の指導回数を増やしたい場合や観察回数を増やしたい方、
ストーマ周囲を清潔に保ちたい方に

交換日数：2日



ユー케어®・TDs Youcare-TDs

種類	商品コードNo.	規格		袋サイズ(縦×横)	1函入数	メーカー希望 小売価格(非課税)
		穴の大きさ	ストーマ有効径			
30フリー	20171	15mmØ	14~29mm(フリーカット)	275mm×150mm	10枚	¥7,550
40フリー	20172	25mmØ	24~39mm(フリーカット)			
50フリー	20173	35mmØ	34~49mm(フリーカット)			
20	21541	20mmØ	14~19mm			
25	21542	25mmØ	19~24mm			
30	21543	30mmØ	24~29mm			
35	21544	35mmØ	29~34mm			
40	21545	40mmØ	34~39mm	300mm×150mm	5枚	¥4,850
45	21546	45mmØ	39~44mm			
50	21547	50mmØ	44~49mm			

交換回数をできるだけ少なくしたい方、皮膚に不安のある方に

交換日数：2~5日



セルケア®1・TDs Cellcare1-TDs

種類	商品コードNo.	規格		袋サイズ(縦×横)	1函入数	メーカー希望 小売価格(非課税)
		穴の大きさ	ストーマ有効径			
30フリー	20151	15mmØ	14~29mm(フリーカット)	300mm×150mm	5枚	¥4,850
40フリー	20152	25mmØ	24~39mm(フリーカット)			
50フリー	20153	35mmØ	34~49mm(フリーカット)			
20	21531	20mmØ	14~19mm			
25	21532	25mmØ	19~24mm			
30	21533	30mmØ	24~29mm			
35	21534	35mmØ	29~34mm			
40	21535	40mmØ	34~39mm	300mm×150mm	5枚	¥4,850
45	21536	45mmØ	39~44mm			
50	21537	50mmØ	44~49mm			



豊富なラインアップで
入院中・退院後も
ずっとシンプルなケアを

ワンピースオストミーシステム
1-Piece Ostomy System


術後早期から使い続けやすい

セルフケアの確立に向けた術後早期の漏れや貼付への不安を軽減し、豊富なサイズラインアップで退院後のシンプルなセルフケアをサポートします。

便の潜り込みを防ぐセーフティプレート

イレオストミー用装具（イレファイン）から搭載された、水様便の潜り込みを防ぐために開発されたプレートです。適度なコシを有する高さ3mmのなだらかな傾斜のプレートが腹壁に密着し、過度に圧迫することなく便漏れのリスクを低減します。

腹壁の硬さを問わず **追従** + **密着** し、便漏れのリスクを低減

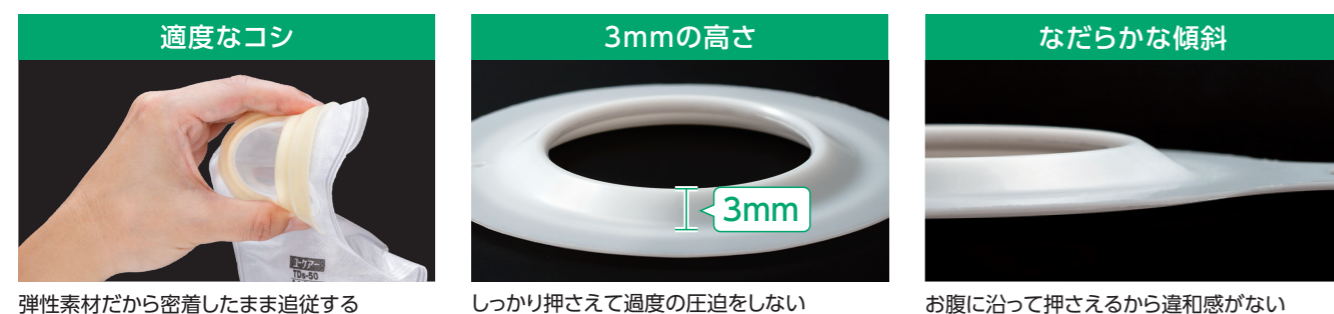


弾性素材だから密着したまま追従する

しっかり押さえて過度の圧迫をしない

お腹に沿って押さえるから違和感がない

貼付中の圧迫状態 (自社データ)

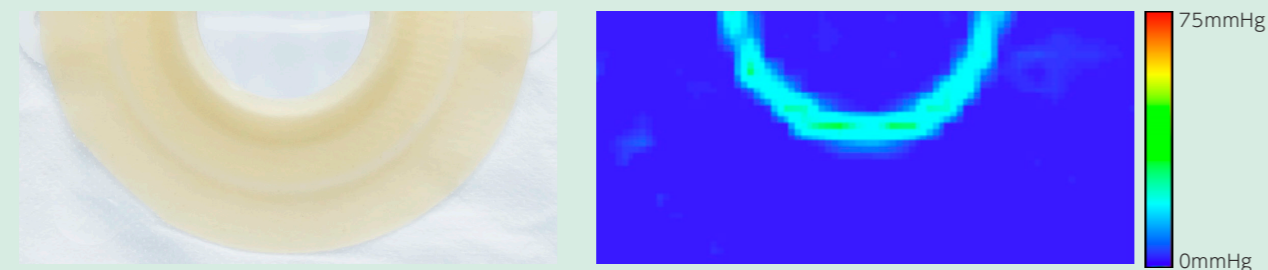


試験方法: 触覚センサを設置した腹壁モデルに面板を貼付後2kgのおもりで荷重
荷重1分後おもりを外し、3分後の圧力変化を観察
使用機器: 腹壁モデル (シリコーン製 沈み込み1縦指程度の硬さ)
触覚センサ (シート状センサ サイズ: 96mm×96mm×約1mm センサ数: 1024個)

小さな面板で術式を選ばず使いやすい

面板外径100mmφ*で、貼付面積がストーマの中心から半径50mmに収まります。低侵襲手術による術創の影響を受けにくく、また小柄な方にも使いやすくなっています。


*フリー 50およびプレカット45, 50は110mmφ

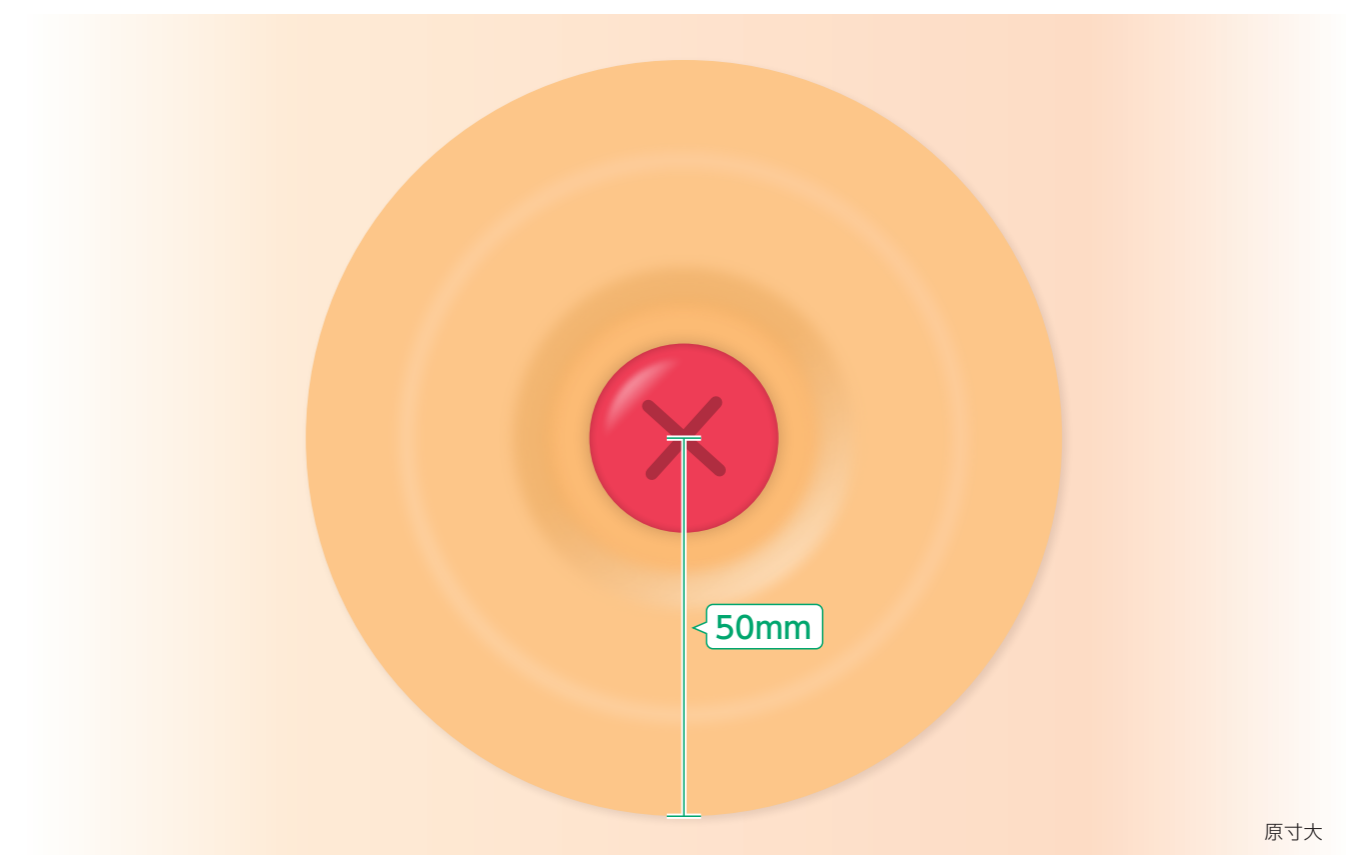

豊富なサイズラインアップ

フリーカットは15mmのカット幅を持った3種類、プレカットは20~50mmまで5mm刻みで7種類のサイズラインアップがあります。

入院中の管理から退院後のオストメイト本人によるシンプルなセルフケアに対応できます。

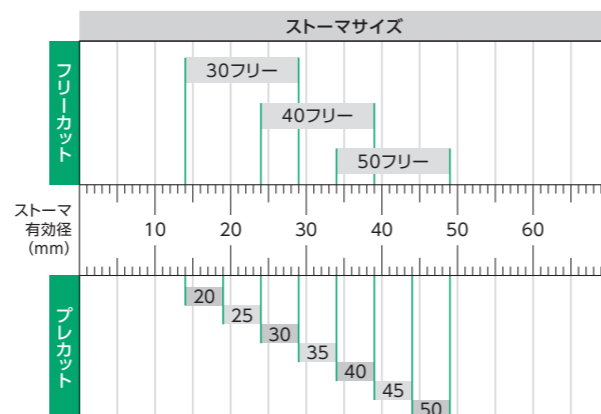

1ヶ月以内に使い切れる量

最大交換日数で貼りかえた場合でも、ユーケアは20日、セルケアは25日で1箱を使い切ることができます。ストーマサイズが変化する術後数ヶ月の間でも、ストーマサイズの変化に合わせて購入量を調整し、サイズを切り替え、シンプルケアを継続しやすくなっています。

