

においが良い香りに  
変わる

トイレに  
流せる

新発想の  
消臭技術  
デオマジック®  
配合

さわやかな  
グリーンフローラル  
の香り



今日もキレイが目に見える  
**デイリーデオワイプ**  
— ストーマ装具用排出口拭き取りシート —


**特長1 新発想の消臭技術「デオマジック®」配合!**

「デオマジック®」はシキボウ(株)が開発した、悪臭成分と合わさると、良い香りになるように作られた臭気対策成分です。

この方法は、香水づくりの原理を応用しています。あらかじめ悪臭成分を取り除き悪臭を取り込みやすい状態にすることで、においが気になる環境で使用すると悪臭成分を効率よく取り込み、良い香りへ変わります!

※すべてのにおいに効果があるわけではありません。また香りの感じ方には個人差があります。  
\*デオマジック®はシキボウ(株)の登録商標です。

「デオマジック®」は不快なにおいを「消す」・「ごまかす」のではなく、利用して良い香りに「変える」※

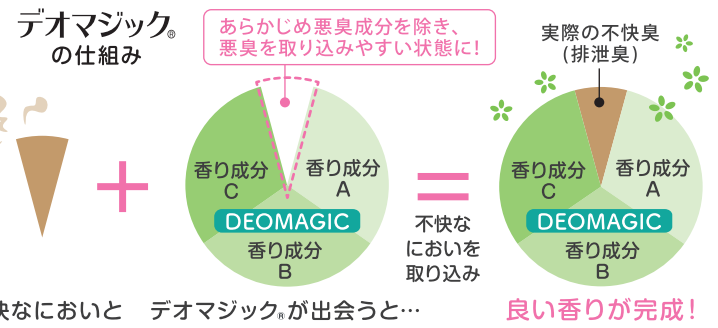

**特長2 ウェットタイプで拭き取りらくらく! トイレに流せる!**

こんなお悩みはありませんか?


- 排出口がキレイに拭き取れない
- 排出口の拭き取りに時間がかかってしまい大変
- トイレに流せないシートだと捨てるのが手間

サッと取り出す



排出口を持ったまま片手で取り出せる(80枚入りのみ)

スッと拭き取る

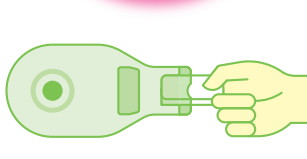

便のこびりつきを素早くキレイに拭き取る

ポイツと捨てる



拭き取り後はトイレに流せる

においが  
良い香りに  
変わる

ウェット  
タイプ

トイレに  
流せる

ノンアルコール

## 選べる2つのラインアップ



片手で  
らくらく!  
フタ付き



80枚入り

- ＊普段使いしやすい80枚入りタイプ!
- ＊片手で簡単!「プラスチックフタ」を採用
- ＊密閉性が高いので、乾きにくく経済的
- ＊毎日使用しやすい価格

お試しタイプ 10枚入り

- ＊試しやすい10枚入りタイプ!
- ＊お出かけや災害時にも便利な少量タイプ
- ＊お買い求めしやすい価格

使用  
方法


1

シートを指に  
巻きつけます



2

ストーマ袋の  
排出口付近に  
付着した排泄物を  
拭き取ります

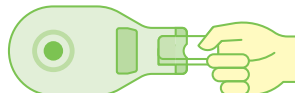

3

使用後は、  
1枚ずつトイレに  
流します



### 使用上の注意

- 目や口、ストーマなどの粘膜へのご使用は避けてください。
- お肌に合わないときは医師に相談してください。
- 乳幼児の手の届かない所に保管してください。
- トイレに流す際は、大の水量で流してください。
- 詰まりを避けるため、必ず1枚ずつトイレに流してください。
- 直射日光のあたる場所や高温の所に保管しないでください。
- 中身の乾燥や香料のものを防ぐため、ご使用後はしっかりとフタを閉め、なるべくお早めにご使用ください。

商品名	商品コード No.	規格	メーカー希望小売価格 (本体価格)
デイリーデオワイプ 80枚入り	21591	80枚入り×3個	¥1,815 (¥1,650)
デイリーデオワイプ お試しタイプ 10枚入り	21592	10枚入り	¥143 (¥130)

※商品パッケージや仕様等につきましては、変更する場合がありますのでご了承ください。

販売元: **アルケア株式会社**

製品に関するお問い合わせ

お客様相談室 ☎0120(770)175

受付時間 9:00~17:30(土・日・祝日を除く)

製造販売元: 日本製紙クレシア株式会社

いつもご購入の販売店へご注文お願いいたします。