

クイックスワブ・コンフォート QUICK SWAB・COMFORT

-26本入-

液剤を含浸させた口腔ケア用綿棒です。器質的・機能的口腔ケアに。



レモン風味



ブルーベリー風味

成分

水、グリセリン、ソルビトール、安息香酸Na、ベンザルコニウムクロリド、ハッカ油、香料

効能効果

口中を浄化する。口臭を防ぐ。

製品特長

- 液剤を含浸しているので、開封後即使用できます。
- 香料入り(レモン・ブルーベリー風味)なので清涼感が得られます。
- 個包装のまま凍らせてアイスマッサージとしてもご使用できます。

製品情報

商品名	種類	商品コード No.	1 箱入数
クイックスワブ・コンフォート	レモン風味	65543	26本/箱
	ブルーベリー風味	65544	26本/箱

※詳細は各営業にお問い合わせください。

[販売元]

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825
www.alcare.co.jp

[製造販売元]

ハクソウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳津町2丁目4番9号

お問い合わせ：コールセンター

フリーダイヤル **0120-770-863** 土・日・祝日を除く
午前9:00～午後5:00

クイックスワブ・コンフォート 4つのおすすめポイント

その1 準備不要


- ★水・コップなどが必要ない
- ★水場のない場所で気軽に使える
(ベッドサイド、訪問看護など)



口腔ケア用のウェットクロスでは、
口が大きく開かずケアしにくい方に

その2 誤嚥のリスクが少ない

- ★歯ブラシ・スポンジと違い、
綿棒からは液剤が少し
ずつ染み出るため、
誤嚥の危険性が少ない

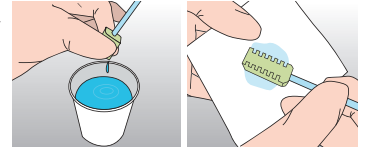


歯ブラシ・スポンジの場合、しぼって水分をきった後、
更にティッシュなどで水分を除去します。

その3 味付き

- ★液剤に味があるため、
楽しみながら口腔ケアができる
- ★楽しさが口腔ケアの
継続に繋がる
- ★味覚を刺激する
訓練にもなる

味を楽しむことが
食べることに對する
意欲の向上に繋がります

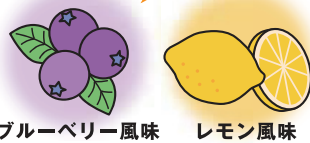

ブルーベリー風味 レモン風味

その4 アイスマッサージが簡単に


- ★個包装のため、冷凍庫で
凍らせておけばすぐに
使用できる
- ★製氷機の細菌による
汚染を気にせず、
清潔な口腔ケアが可能

嚥下反射を誘発させる
アイスマッサージは、
繰り返し行うことが
重要です




アイスマッサージ、口渇ケアとしてもお使いいただけます。

使用手順

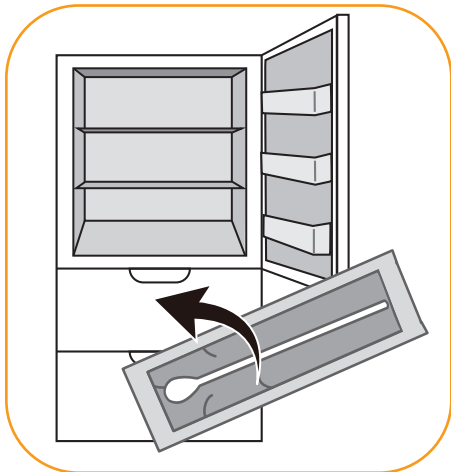

①本品を冷凍庫に入れて、本品に含まれる
液体を凍らせます。
※製品の箱毎冷凍庫に保管いただけます

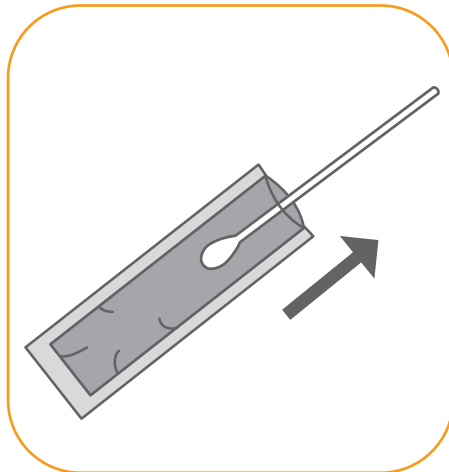

②冷凍庫から使用する本数を
取り出します。
個包装の袋を開封し、中の
綿棒を取り出します。



③取り出した綿棒を口腔内に挿入し、
ケアをします。

クイックスワブ・コンフォートの
ご使用方法に関する動画はこちら



527-0125