




そのお悩み、『肌着』をかえてみませんか。

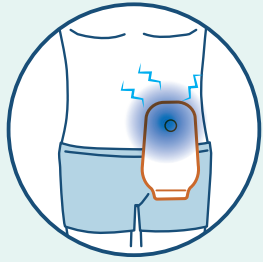


装具下に汗をかいて  
ペタペタする

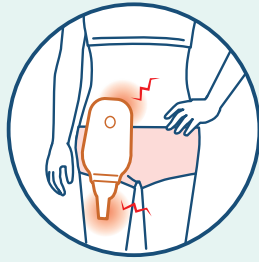

歩くと装具が肌に擦れる

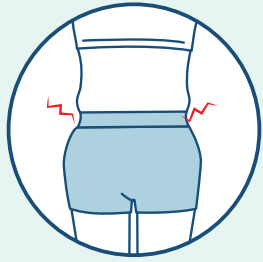

ゴムの締め付けがきつい

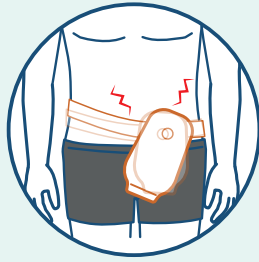

装具が安定しない

快適な着けごころ

ふんわり  
やさしい  
肌ざわり

きりっぱなし生地

自分で  
カットOK  
ほつれにくい

包み込むフィット感

ゴム  
不使用

やわらかくフィット



ゴムを全く使わず、グンゼ独自開発の編み技術によって、まるで包み込むようなサポート力を実現しました。

肌ストレス軽減




凹凸の無いフラットな生地に仕立て、摩擦などによる肌への刺激を抑えています。

### 使用方法 やわらかウエストチューブ／チューブ・消臭

#### ①本品を切る


※チューブ・消臭は、そのまま使用できる40cmです。

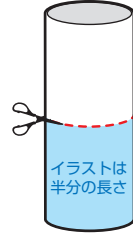


#### ②ストーマ袋を通す穴を開ける



#### ③本品を着用し、ストーマ袋を通す

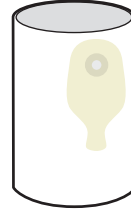


袋の支えをつくる 下端を折返し、ポケット状にして袋を支えることもできます。

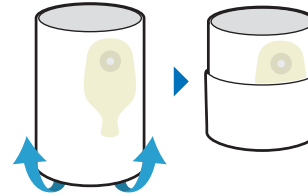


### 使用方法 やわらかウエストショーツ

股上をカットして  
長さを調整できます。

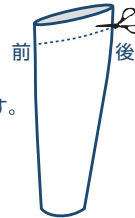

ストーマ袋を外側に  
出すときは、通す穴を  
カットして使用します。

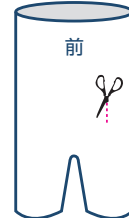

ストーマ袋を  
装着したときの  
イメージ



ストーマ袋を  
外側に出す  
場合  
※通す穴を  
カットします



ストーマ袋を  
内側にしまう  
場合

【注意】穴の開け方は、商品パッケージに記載している取扱説明書をご確認ください。

販売元 アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階  
〒130-0013 [www.alcare.co.jp](http://www.alcare.co.jp)

製造元 グンゼ株式会社

●本カタログの内容は2025年10月現在のものです。  
●商品の仕様、デザインおよび価格は、改良や経済状況の変動などにより予告なく変更することがあります。

日本製  
made in Japan



肌着を科学するグンゼの研究から生まれた  
オストメイト用『肌着』

やわらかウエストシリーズ

MediPro  
Support

by

MediCure  
メディキュア

# やわらかウエスト チューブ・消臭

■素材 綿 65%、ポリウレタン 35%

S~3Lの5サイズ展開

※ブラックは3サイズ展開となります

そのまま使える長さです




使い方や商品詳細はこちら



# やわらかウエスト チューブ

■素材 綿 65%、ポリウレタン 35%

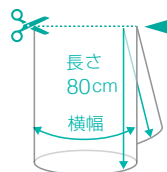


使い方や商品詳細はこちら



# やわらかウエスト ショーツ

■素材 綿 65%、ポリウレタン 35%

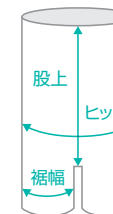

使い方や商品詳細はこちら



種類	色	サイズ	商品コード No.	チェック欄	規格 (cm)		着用の目安 参考腹囲 (cm)	入数	メーカー希望小売価格 (本体価格)
					横幅	長さ			
プッシュガン	S	21551			26	40	60~75	1枚	¥1,980 (¥1,800)
	M	21552			28		70~85		
	L	21553			30		80~95		
	LL	21554			33		90~105		
グレーモク	S	21561			26	40	60~75	1枚	¥1,980 (¥1,800)
	M	21562			28		70~85		
	L	21563			30		80~95		
	LL	21564			33		90~105		
ブラック	S	21565			26	40	60~75	1枚	¥1,980 (¥1,800)
	M	21571			28		70~85		
	L	21572			30		80~95		
	LL	21573			33		90~105		

※着用感は個人差があります。参考腹囲は目安です。

※腹囲: ストーマのある位置から腹部を1周した長さ

種類	色	サイズ	商品コード No.	チェック欄	規格 (cm)		着用の目安 参考腹囲 (cm)	入数	メーカー希望小売価格 (本体価格)
					横幅	長さ			
プッシュガン	M	20711			28	80	70~85	1枚	¥3,000 (¥2,727)
	L	20712			30		80~95		
	LL	20713			33		90~105		
モグクレー	M	20721			28	80	70~85	1枚	¥3,000 (¥2,727)
	L	20722			30		80~95		
	LL	20723			33		90~105		

※着用感は個人差があります。参考腹囲は目安です。

※腹囲: ストーマのある位置から腹部を1周した長さ

種類	色	サイズ	商品コード No.	チェック欄	規格 (cm)		着用の目安 参考腹囲 (cm)	入数	メーカー希望小売価格 (本体価格)
					股上	裾幅			
プッシュガン	S	21081			42	16	82~90	1枚	¥2,970 (¥2,700)
	M	21082			43	17	87~95		
	L	21083			45	18	92~100		
	LL	21084			46	19	97~105		
グレーモク	S	21091			42	16	82~90	1枚	¥2,970 (¥2,700)
	M	21092			43	17	87~95		
	L	21093			45	18	92~100		
	LL	21094			46	19	97~105		
ブルー	M	21102			43	17	87~95	1枚	¥2,970 (¥2,700)
	L	21103			45	18	92~100		
	LL	21104			46	19	97~105		


※着用感は個人差があります。ヒップサイズは目安です。

※ブルーは在庫がなくなり次第、販売を終了とさせていただきます。

## やわらかウエスト チューブ・消臭

<イメージ図>

イオン吸着して中和/消臭!

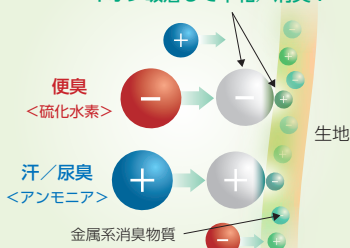

便臭・尿臭を軽減!

- 繊維上の硫化水素・アンモニア臭の消臭効果を外部機関で確認しております。
- 消臭試験により効果は確認していますが、感じ方には個人差があります。
- 洗濯を重ねることにより、消臭効果は低減します。

## 活用法のご紹介

1		面版の貼付位置に切れ目を入れてストーマ袋を外に出す。	装具やベルトの肌あたりを軽減	<input type="radio"/>
		チューブ・消臭/チューブ ショーツ	装具の目隠し	<input type="checkbox"/>
			装具の支え	<input type="checkbox"/>

※写真はやわらかウエストチューブ(半分カット)を使用

装具が直接肌に触れない

折り返してストーマ袋を支えられる

装具穴はハサミを1回入れるだけ

断面がほつれにくい

2		面版の貼付位置に切れ目を入れてストーマ袋を外に出し、下側から折り返す。	装具やベルトの肌あたりを軽減	<input type="radio"/>
		チューブ・消臭/チューブ	装具の目隠し	<input type="radio"/>
			装具の支え	<input type="radio"/>

3		傍ストーマ固定ベルトを着用する前に下巻きとして着用する。	装具やベルトの肌あたりを軽減	<input type="radio"/>
		チューブ・消臭/チューブ ショーツ	装具の目隠し	<input type="radio"/> *1
			装具の支え	<input type="radio"/> *1

※写真はやわらかウエストチューブ(半分カット)の上から傍ストーマ固定ベルト(ワラストーマベルト)を着用。傍ストーマ固定ベルト着用部にはシワが出来ないようにご注意ください。\*1)チューブ・消臭/チューブを使用して下側から折り返した場合のみ

ゴム不使用 きつくない

カットして長さを調整できる

\*マチ部(股下部)はカットできません。

一枚ばきOK

歩行時 肌に擦れない

4		面版の貼付位置に切れ目を入れてストーマ袋を外に出し、上側から折り返す。	装具やベルトの肌あたりを軽減	<input type="radio"/>
		チューブ・消臭/チューブ ショーツ	装具の目隠し	<input type="radio"/>
			装具の支え	<input type="checkbox"/>

※写真はやわらかウエストショーツを使用。