

アドプロテープ®・クッション使用ガイド

アドプロテープ・クッションは、医療関連機器による外力を低減するクッション付きシリコンゲルテープです。

注意事項

- カットサイズは目安です。お使いの医療関連機器・患者様の身体のサイズに合わせて適宜調整してください。
- 本品は医療機器ではありません。直接創部には貼らないでください。
- 脆弱な状態の皮膚には貼付しないでください。
- 口や鼻の周囲に使用する場合は、本品がしっかり貼り付けられ、剥がれないか頻繁に確認してください(脱落によって本品の誤飲や窒息のおそれがあります)。
- 安全にお使いいただくため、用途以外の使用はせず、取扱説明書及び本ガイドをよく読んで正しくご使用ください。

貼付箇所・カット例


製品サイズ

カットサイズ

弾性ストッキング


履き口

5cm幅

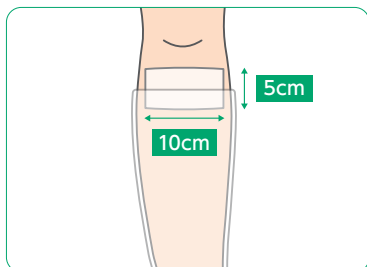

脛骨(右足例)


5cm幅

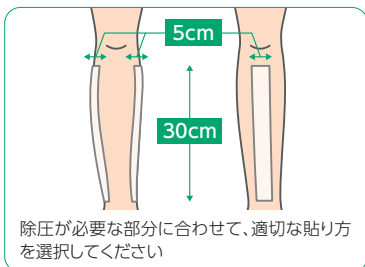

尿道留置カテーテル


腹

5cm幅

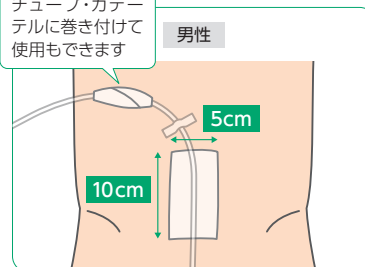

もも


5cm幅

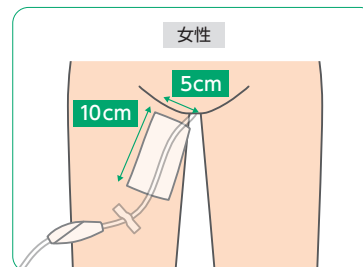

シーネ

踝、膝下


5cm幅

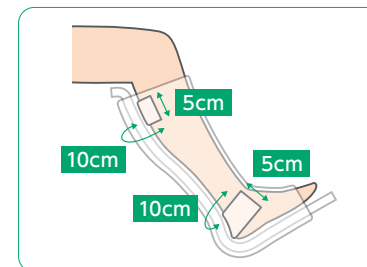

酸素マスク

鼻、顎、頬


2.5cm幅

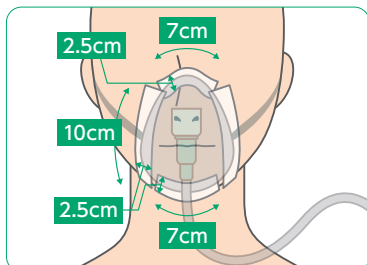

酸素カニューラ


頬

2.5cm幅

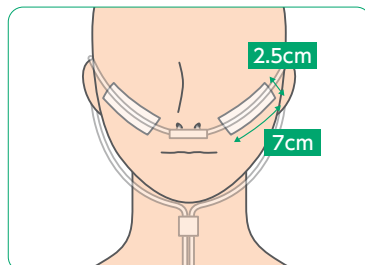


耳介

2.5cm幅

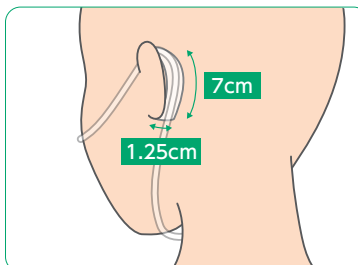

製品ラインナップ

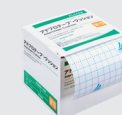

10cm幅



5cm幅



2.5cm幅

種類	W10	W5	W2.5
商品コードNo.	21341	21342	21343
規格	10.0cm×2m	5.0cm×2m	2.5cm×2m
1箱入数	1巻	1巻	2巻