

アドプロテープ®・クッション Adprotape Cushion

クッション付きシリコンゲルテープ
Cushioned Silicone Gel Tape

W10


サイズ: 10.0cm×2m

使用上のご注意

⚠ 警告

- 本品は医療機器ではありません。直接創部に貼らないでください。
- 脆弱な状態の皮膚には貼付しないでください。
- 口や鼻の周囲に使用する場合は、本品がしっかり貼り付けられ、剥がれないか頻繁に確認してください。[脱落によって本品の誤飲や窒息のおそれがある]

〈テープの取り出し方〉

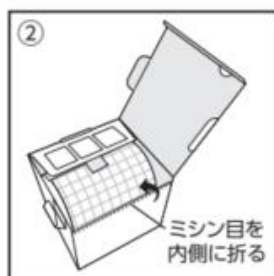

保管方法

- 水濡れに注意し、直射日光および高温多湿を避けて室温で保管してください。

廃棄方法

- 材質および使用状況に基づき、適切に処置してください。

品質表示

テープ: ポリウレタン、シリコン
剥離シート: ポリエステル

使用上のご注意

- 小児に使用させる場合は保護者の監督のもとでご使用ください。
- 使用中は肌の状態をよく観察し、発疹・発赤、かゆみなどの症状があらわれた場合には使用を中止して医師に相談してください。
- 本品は保管状況によって変色することがありますが品質に問題はありません。
- 本品は、防水ではありません。入浴・シャワー時には、防水テープなどで本品を被覆してください。
- 本品は圧迫が強すぎるとクッション性が損なわれる場合がありますので圧迫の状態を確認してご使用ください。
- 本品は繰り返し使用せず適宜新しいものに貼り替えてください。

使用方法

- 本品は箱に入れてお使いください。
- 貼付部位の水気、油分をよく取ってご使用ください。
- 本品を剥がす際は、皮膚が変形しないように皮膚を押さえテープに対して180°の方向にゆっくり剥がしてください。