

- 本品の装着中、面ファスナーのフックにより手指や皮膚などを傷つけるおそれがありますので、ご注意ください。
- 本品の装着中、本品および本品内に入っているキャストステーの変形・破損や面ファスナーが外れやすくなった場合は、直ちに使用を中止し、医療従事者に連絡してください。

注 意

- 本品の調整が必要な場合は、使用者自身による本品の改造・加工は行わず、医療従事者に相談し、指示に従ってください。
- 面ファスナーのフックで衣料品など傷つけるおそれがありますので十分に気をつけてください。

取扱上のご注意

廃棄方法

- 本品を廃棄する場合は、各自治体の廃棄区分に従ってください。

保管方法

- 本品を保管する際は、車中など高温になる場所や低温になる場所、暖房器具の熱などが直接あたる場所などには置かないでください。
- 水濡れに注意し、直射日光を避けて、室温で保管してください。

お手入れ方法

- 本品が汚れた場合は、やわらかい布を水に浸し、よく絞ってから装着した状態で汚れを拭き取るようにしてください。
- 本品全体を水で濡らさないでください。濡らしてしまうと、本品を一定時間外した状態で乾燥させる必要があります。

品質表示

キャストステー：芯材層：ガラス繊維、水硬化性ポリウレタン樹脂
被覆層：ポリエステル
ベルトなど：ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、ポリプロピレン、ポリアセタール
スペーサー：ポリウレタン、ナイロン

ALCARE

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825
www.alcare.co.jp

2003-1

for Best Care **ALCARE**

フィットキュア®・ナックル Fit Cure-Knuckle

カバー付きキャストイングシステム
Casting System with Cover

取扱説明書

使用者向け

- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、商品の特性を十分理解してからご使用ください。
- 常に、この取扱説明書をお手元に置き、必要に応じてお読みください。
- 本品を適切に装着できるように、必ず医療従事者の指導に従ってください。
- 本品の設定を変更する場合は、必ず医療従事者に実施してもらってください。

一般医療機器 / 単回使用医療機器
ギプス包帯
医療機器届出番号:13B1X00207000075

お客様相談室 ☎ **0120-770-175**

(土・日・祝日を除く 午前9:00~午後5:30)

www.alcare.co.jp

はじめに

《フィットキュア・ナックル》は、手指の骨折などにおける支持、固定を目的に開発された商品です。
安全にお使いいただくため、用途以外の使用はせず、この取扱説明書に従いご使用ください。
商品についてご不明な点は当社お客様相談室までご連絡ください。

使用上のご注意


*【使用上のご注意】では、その危険度に応じて次の区分をしております。

⚠ 警告……人身事故につながるおそれのある注意事項
注 意……物損事故につながるおそれのある注意事項

警 告


- 本品の装着状況に応じた装着管理(就寝時、本品の取り外しの可否、ベルトの締め加減、装着位置、装着時間、装着期間など)については、必ず医療従事者の指示に従ってください。
- 本品の中には、キャストステー(固定するギプス)が入っています。医療従事者の指示なく本品から取り出さないでください。
- 本品の装着中、品質表示で使用している素材に対するアレルギーの発現や過敏な状態になってしまった方は、医療従事者に相談してください。
- 本品の装着中、過度の圧迫や偏ったあたり、締め付けすぎなどに注意してください。装着時に痛み、しびれ(神経障害)、血行障害、皮膚障害などの異常が生じた場合は各ベルトをゆるめ、医療従事者に連絡してください。
- 本品の装着中、意図せずに外れたり大きなずれが生じたりした場合は、直ちに医療従事者に連絡してください。
- 本品の装着中、本品に対して無理な力や荷重をかけないでください。本品の変形や破損にともなうけがや症状の悪化を引き起こす可能性があります。
- 本品の装着中、汗が気になる場合や水に濡れてしまった場合は、タオルなどで拭き取り、よく乾かしてください。水分を含む湿った状態で使用すると皮膚かぶれなどのおそれがあります。
- 面ファスナーは汗や水で濡れた状態で使用しないでください。面ファスナーは濡れた状態でとめると外れるおそれがあります。

各部の名称 ※イラストは「右手」装着の図です。

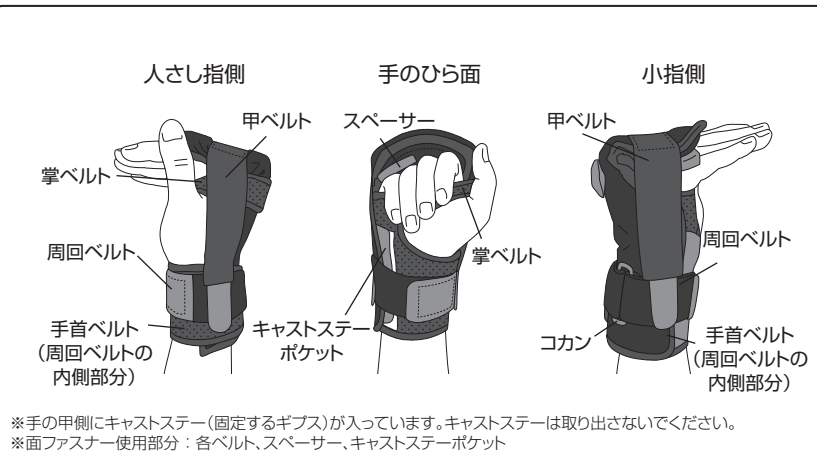

製品仕様およびデザインは、品質改良にともない変更する場合がございます。それにより、イラストと実際の製品とで若干の違いが生じる場合がございますことをご了承ください。

装着図

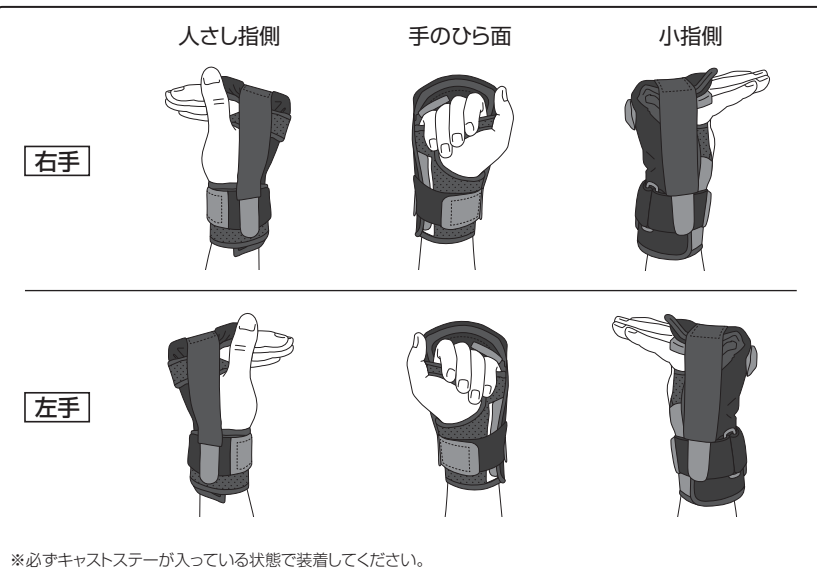

使用手順 ※イラストは「右手」、「左手」装着の図です。


装着の前に

注意


- 本品は、医療従事者の指示なく着脱する商品ではありません。
- 医師の指示により着脱が許可された場合に、医師の指導および手順に従って正しく装着してください。

※医療従事者の指示なしに、初回装着時に設定した、手指の関節の角度、各種ベルトの位置などを変更しないでください。
※本品からキャストステー(固定するギブス)は取り出さないでください。
※スペーサーが取り付けられている場合、スペーサーは取り外さないでください。


(装着準備)はじめに全ての面ファスナーを外し、手の甲側にあてます。

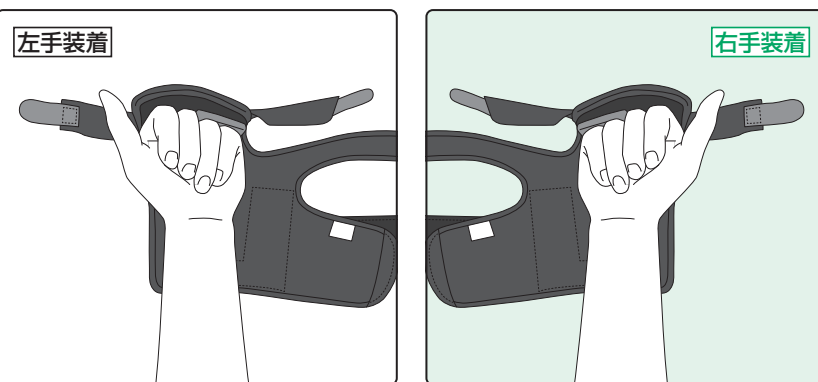


① 手首ベルトを手首に回し、甲側へとめます。

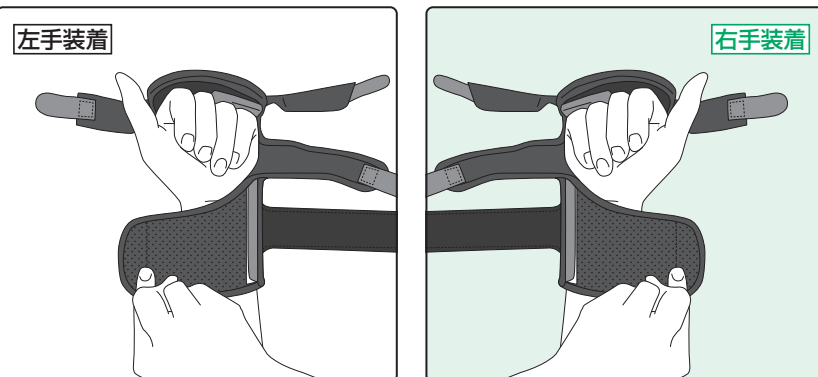

② 掌ベルトを手のひらに通し、甲側へとめます。

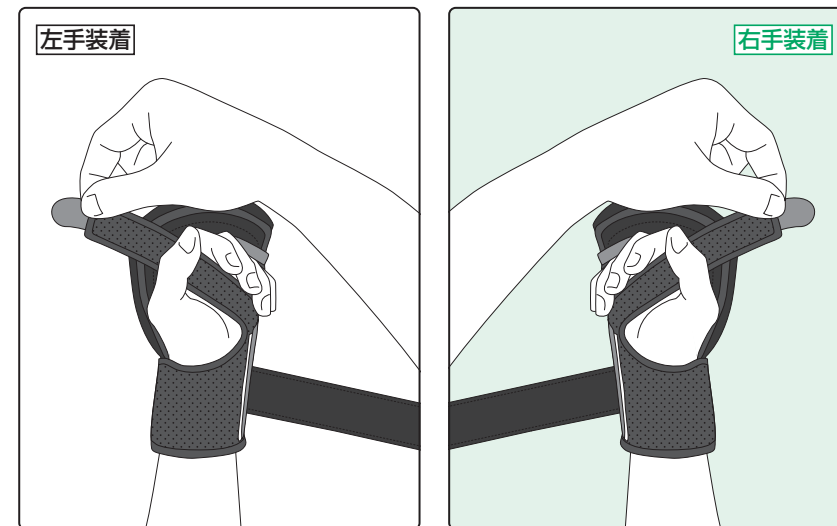

③ 周回ベルトをコカンに通し、折り返してとめます。

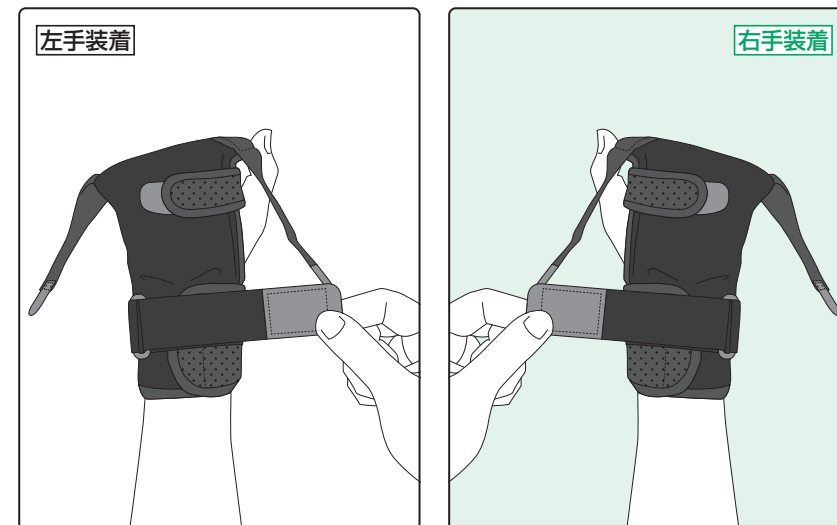

④ 甲ベルト(人さし指側、小指側の2カ所)をとめます。



※装着位置が正しいこと、局所的な過度の圧迫や食い込み、あたりがないことを確認します。
※ベルトの面ファスナーは締め付けすぎたり、ゆるすぎたりしないように調整した後、しっかりとめてください。

外し方

本品を外す際は、④甲ベルト(2カ所)、③周回ベルト、②掌ベルト、①手首ベルトの順に、この4カ所のみを外してください。