

採尿バッグ

Urinary Bag

採尿バッグ
Urinary Bag

取扱説明書

- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、商品の特性を十分理解してからご使用ください。
- 常に、この取扱説明書はお手元に置き、必要に応じてお読みください。

お客様相談室 ☎ **0120-770-175**

(土・日・祝日を除く 午前9:00～午後5:30)

www.alcare.co.jp

はじめに

〈採尿バッグ〉は弊社のウロストミー用ストーマ装具専用開発された、院内での使用や夜間時の使用を目的とした接続バッグです。独自のコネクター付で、「適応するストーマ装具」にワンタッチで接続できるようになっています。安全にお使いいただくため、用途以外の使用はせず、この取扱説明書に従いご使用ください。


「適応するストーマ装具」

プロケアー1・U/Uc、プロケアー2・U、バイオマックス ウリナリーパウチ、
バイオユーリン スーパー、バイオユーリン、小児用プロケアー1・U

使用上のご注意


- ご使用前には必ずクランプをし、排尿チューブが閉じていることを確認してください。
- 本品は寝かせて使用することが可能ですが、その場合流れが滞らないよう本品を低い位置におき、高さをつけてご使用ください。
- チューブが折れた状態で使用すると流れが遮断されることがありますのでご注意ください。
- 本品は消耗品ですので2週間をメドに新しいものと交換してください。
- 本品の目盛りは目安ですので正確に計量したい場合は他の容器に移し替えてください。
- 滅菌が必要な場合はEOG滅菌をしてください。
- 他メーカーのストーマ装具等に接続する場合は市販のコネクターをご利用ください。

ご使用になる前に

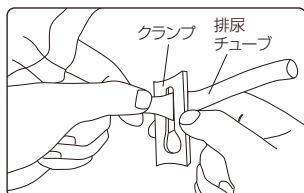


クランプをスライドさせて、排尿チューブが完全に閉じていることを確認してください。

ストーマ装具への接続方法

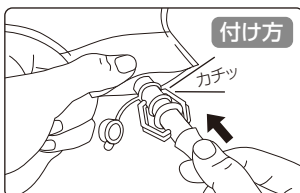


キャップのみを外したウリナリーパウチに、採尿バッグのコネクターを“カチッ”と音がするまで強く差し込みます。

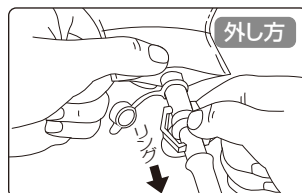


- ①コネクターのリング部分を押し下げながら引き抜きます。
- ②ウリナリーパウチの排出口にキャップを付けます。

ベッドへの吊り下げ方法

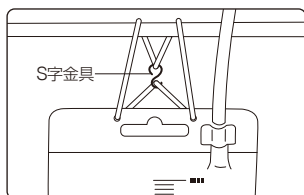


ハンガー紐をそのままベッドのフレームに通し、S字金具に引っ掛けます。

排尿方法

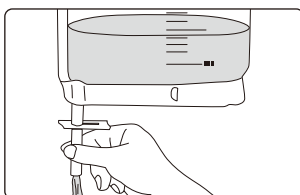

- ①クランプをスライドさせて排尿チューブを開き、尿を排出します。

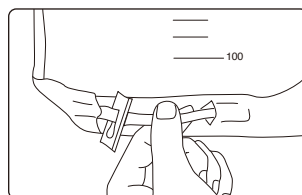

- ②クランプをスライドさせ排尿チューブを閉じ、チューブをチューブ差込口に入れます。

ALCARE

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013

TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825

www.alcare.co.jp