

## やわらか ウエストチューブ




やわらかくフィットして  
面板周囲の肌を保護

オストメイト向け

男女兼用

MediPro  
Support  
by  
MediCure  
メディキュア by GUNZE

GUNZE

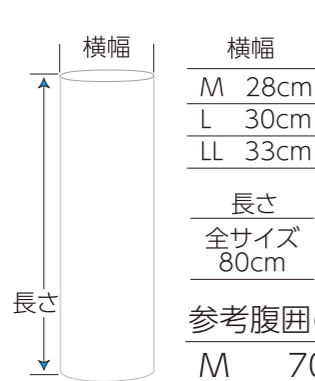

MediPro  
Support  
by  
MediCure

横幅	長さ
M 28cm	全サイズ 80cm
L 30cm	
LL 33cm	

参考腹囲(着用の目安)

M	70~85cm
L	80~95cm
LL	90~105cm

※着用感は、個人差があります。  
サイズは、目安です。


どこでも自由に  
カットして使えます!





## 取扱い説明書 やわらかウエストチューブ

### 使用方法


- 1.本品を切る。
- 2.ストーマ袋を通す穴を開ける。
- 3.本品を着用し、ストーマ袋を通す。

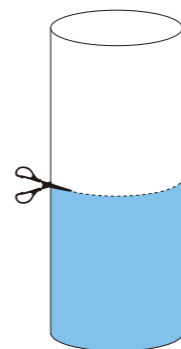

イラストは  
半分の長さ

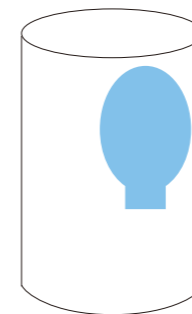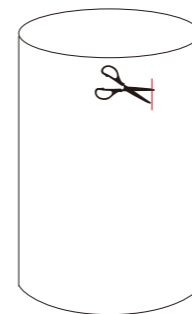

※下端を折返し、ポケット状にして、袋を支えることもできます。

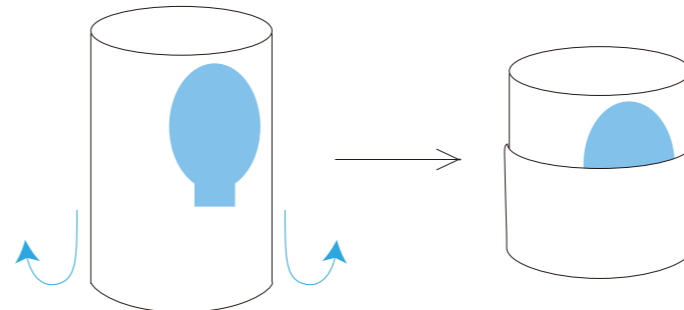

### お取り扱いの注意

- 取扱い表示記号を参考にして、お洗濯してください。
- 濃色物と白物との同時洗濯は、色移り、ケバ付着の原因となりますのでお避けください。
- 白物と色物との漬け置きは避け、洗濯後は速やかに形を整えて干してください。
- ポリウレタン繊維(腰ゴムなど)使用の場合は、塩素系漂白剤の使用はお避けください。劣化・変色をさせます。
- この製品は、生地端を裁ち切りで無縫製にしています。
- この無縫製の生地端は特殊加工でほつれにくい仕上げになっていますが、強く引っ張ったりしますと部分的にほつれた状態になることがあります。
- 着脱の際には生地端に強い力がかけられないようご注意ください。

販売元 アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階  
〒130-0013 [www.alcare.co.jp](http://www.alcare.co.jp)

お客様相談室  
☎ 0120-770-175

製造元 グンゼ株式会社

このコードは当社  
管理用コードです。  
携帯サイトでは  
ありませんので、  
ご注意ください。



(T)NP9008A-IN

日本製



外表:PP  
クリップ:PS  
中紙  
台紙  
※商品によっては包装にクリップを  
使用していないものもございます。

### お取り扱いの注意

- 塩素系漂白剤の使用はお避けください。  
劣化、変色をさせます。
- この製品は、生地端を断ち切りにしてあります。
- 生地端は、特殊加工でほつれにくい仕上げに  
なっていますが、強く引っ張ったりしますと  
部分的にほつれることがあります。

### 商品に関するお問い合わせ

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階  
〒130-0013 [www.alcare.co.jp](http://www.alcare.co.jp)

お客様相談室 ☎ 0120-770-175

2018年7月作成