

## セルケア<sup>®</sup>2・BC Cellcare 2-BC ユー케어<sup>®</sup>2・BC Youcare 2-BC プロ케어<sup>®</sup>2・BC Procare 2-BC

ツーピースオストミーシステム 入浴用キャップ  
2-Piece Ostomy System

### 取扱説明書

- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上、商品の特性を十分理解してからご使用ください。
- 常に、この取扱説明書をお手元に置き、必要に応じてお読みください。

お客様相談室 ☎0120-770-175  
(土・日・祝日を除く 午前9:00～午後5:30)  
www.alcare.co.jp

## はじめに

セルケア2・BC、ユー케어2・BC、プロ케어2・BCは、面版とストーマ袋とが独立した二品系器具専用の入浴用キャップです。安全にお使いいただくために、用途以外の使用はせず、この取扱説明書及び面版に付属の取扱説明書に従いご使用ください。

## 使用上のご注意

- \* [使用上のご注意]では、その危険度に応じて次の区分をしております。  
△ 警告……誤った取り扱いをすると、中等度以上の人身事故が想定される内容を示します。  
注 意……誤った取り扱いをすると、人が軽度の障害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。

ご使用前には、医師または看護師の指導を受けた上、注意事項を熟読し、本品の特性を十分理解してください。

## 保管上のご注意

### 注意

変形などの品質劣化の原因となりますので、保管の際は次のことを避けてください。


- 高温(40℃以上)・多湿の場所での保管
- 直射日光が当たる場所での保管
- 圧迫がかかる場所での保管

## 使用手順

### ●装着する時

- 1 入浴の前に、普段お使いになっているストーマ袋を外します。(ストーマ袋の外し方については、面版やストーマ袋に付属の取扱説明書をご参照ください。)

- 2 取り外したストーマ袋の代わりに入浴用キャップをはめ合わせます。はめ合わせ方については、ストーマ袋を装着する時と同様に行ってください。

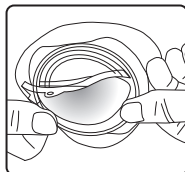

- 3 はめ合わせたら、リングの部分をなぞったりして、はめ合わせが正確にできていることを確認してください。

### ●外す時

- 1 入浴後、取り外し用タブを持ち、もう一方の手で面版側の取り外し用タブを押さえながら、ゆっくりと外します。(キャップ内に、排泄物が出ている場合がありますので、キャップの外にごぼれ出ないようにご注意ください)

- 2 入浴用キャップを取り外した後、普段お使いになっているストーマ袋を装着します。

- 3 使用後の入浴用キャップは、ぬるま湯等で洗浄し、水気を切って乾燥させます。(乾燥に際し、ドライヤー等で過度の熱が加わると入浴用キャップが変形する場合があります。品質劣化の原因となりますので、自然に乾燥させるようにしてください)

## 廃棄方法

使用済みの本品は、排泄物をトイレに流した後、新聞紙などに包み、ごみ袋に入れてお捨てください。通常「燃えないゴミ」の扱いですが、地域により異なる場合もありますので、詳しくは各自自治体へご確認ください。

## 入浴用キャップの種類・規格

	種類	商品コード No.	規格(ドーム高さ)	1函入数	適応商品
セルケア2・BC	M	18291	20mm	2コ	セルケア2
	L	18292	20mm	2コ	F(LLを除く)/Fc
ユー케어2・BC	M	16681	20mm	2コ	ユー케어2
	L	16682	20mm	2コ	
	65	16683	20mm	2コ	F/Fc/Fu/Fuc
プロ케어2・BC	30	12181	20mm	5コ	プロ케어2
	40	12182	20mm	5コ	
	50	12183	20mm	5コ	

# ALCARE

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013  
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825

www.alcare.co.jp