

使用
方法


1

シートを指に
巻きつけます



2

ストーマ袋の
排出口付近に
付着した排泄物を
拭き取ります

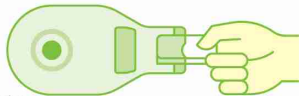

3

使用後は、
1枚ずつトイレに
流します



使用上の注意

- 目や口、ストーマなどの粘膜へのご使用は避けてください。
- お肌に合わないときは医師に相談してください。
- 乳幼児の手の届かない所に保管してください。
- トイレに流す際は、大の水量で流してください。
- 詰まりを避けるため、必ず1枚ずつトイレに流してください。
- 直射日光のあたる場所や高温の所に保管しないでください。
- 中身の乾燥や香料のもれを防ぐため、ご使用後はしっかりとフタを閉め、なるべくお早めにご使用ください。

| 商品名 | 商品コード No. | 規格 | メーカー希望小売価格 (本体価格) |
|------------------------------|--------------|----------|----------------------|
| デイリーデオワイプ 80枚入り | 21591 | 80枚入り×3個 | ¥1,815 (¥1,650) |
| デイリーデオワイプ お試しタイプ 10枚入り | 21592 | 10枚入り | ¥143 (¥130) |

※商品パッケージや仕様等につきましては、変更する場合がありますのでご了承ください。