

# ラパック・スーパー Lapack-Super


コロ／イレオストミー用パウチ  
Colo/Ileostomy Pouch

## 取扱説明書

- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上、商品の特性を十分に理解してからご使用ください。
- 常に、この取扱説明書をお手元に置き、必要に応じてお読みください。

お客様相談室 ☎0120-770-175  
(土・日・祝日を除く 午前9:00～午後5:30)  
www.alcare.co.jp

## ラパック・スーパーの使用方法

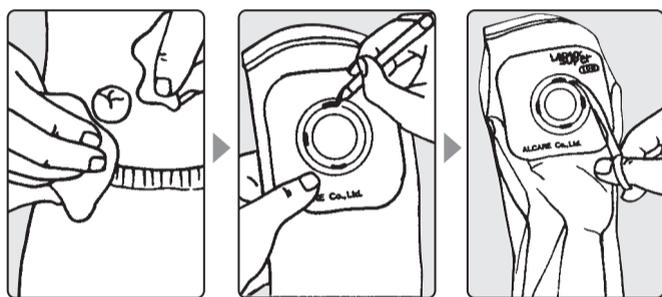

### ① ストーマ周囲を清拭します。

使用する前にまず浴用石鹸や微温湯を用いてストーマ周囲の皮膚を清潔にします。

この時、粘着を悪くする皮膚表面の油分を十分に取り除くようにしてください。石鹸成分は十分に洗い流すようにしてください。面板が付きにくくなることや剥がれの原因となります。

その後、皮膚をよく乾かします。  
\*ドライヤーの熱風はストーマに刺激を与えますので、使用は避けましょう。

### ② 粘着部に印をつけます。

ストーマのサイズを計測し、その大きさに合わせて粘着部に印をつけます。印はできるだけ粘着部の中央につけるようにしてください。粘着部の数字は穴径mmを表わしています。

### ③ 粘着部に穴を開けます。

〈G/Fの場合〉  
ストーマ袋を切らないように、ストーマ袋内に手を入れて、ハサミで穴を開けます。この時粘着面を2つ折りにして切ると、モレの原因となりますのでお避けください。

穴の大きさはストーマ径より1～2mm大きいサイズとし、定められたカットラインを越えて切らないでください。面板からのモレの原因となります。

〈Cの場合〉  
粘着部中央の丸い小片を取り除くと30mm径の穴が開きます。この穴よりもストーマが大きい場合は、ハサミで穴の周囲を切り取るようにしてください。


### ④ 剥離紙を剥がして貼付します。

粘着部の剥離紙を剥がし、あけた穴をストーマに合わせて、下から上に向かって貼っていきます。粘着面にシワができませんので、注意して貼ってください。

### ⑤ 手で粘着面を押えます。

粘着面をしばらく手で押えて、皮膚によく密着させます。特にストーマの周りや粘着部周囲を十分に押えてください。剥がす際は片手で皮膚を押えながら、ゆっくりと剥がします。

## ラパック・スーパーGの下部開口部の止め方

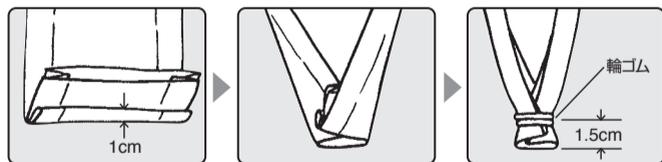


① 下方より5～6cmの部分で一度折り返し、さらに折り目から1cm位上で折り返します。

② 折り返した部分を図のように両端から3つ折りにします。

③ さらに両端から同様に3つ折りにし、下部から1.5cm位上を付属の輪ゴムで止め、密閉します。

## ラパック・スーパーFのファスナーの使い方

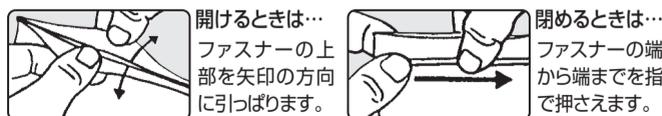

開けるときは…  
ファスナーの上部を矢印の方向に引っぱります。

閉めるときは…  
ファスナーの端から端までを指で押さえます。

## 使用上のご注意

ご使用前には、医師または看護師の指導を受けたうえ、注意事項を熟読し、本品の特性を十分に理解してください。


- ラパック・スーパーGに付属の輪ゴムは、天然ゴムを使用しています。天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがあります。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。
- ストーマ周囲には軟膏など、粘着力の低下の原因となるものは塗らないでください。粘着力低下によるモレの原因となります。(被膜剤もその特性上、粘着力に影響を与える場合があります。お使いの場合は、被膜剤の取扱説明書をよくご確認ください。)

## はじめに

《ラパック・スーパー》は低コストで、しかもニオイの心配がないストーマ装具です。

《ラパック・スーパー》は面板に粘着剤を使用し、ストーマ袋にガス遮蔽性のあるフィルムを用いた低コストのストーマ装具です。豊富な商品構成はあらゆるサイズのストーマにも適応し、便の性状や量によって、あなたに合った最適なストーマ袋をお選びいただけます。安全にお使いいただくため、用途以外の使用はせず、この取扱説明書に従ってご使用ください。

## ■ラパック・スーパーの選び方

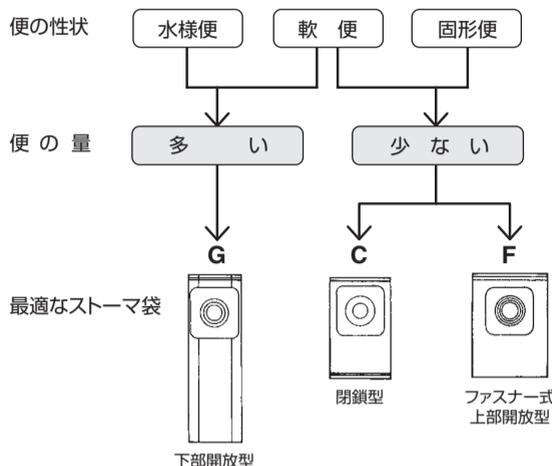

- 剥離紙を剥がした面板の表面には、指などが触れないようにご注意ください。粘着力低下によるモレの原因となります。
- 一度剥がした装具をもう一度貼るはお止めください。粘着力低下によるモレの原因となります。
- 装具を装着状態で折り曲げないでください。ストーマ袋の穴あきによるモレの原因となります。
- 面板の粘着面が冷たくなっていると、貼り付きが悪い場合がありますので、暖かい部屋に移し、全体が温まってからご使用ください。
- 1週間以上貼り続けしないでください。装具の使用日数が長くなると、粘着力低下によるモレの原因となりますので、ご注意ください。装具の交換日数は、発汗や排泄物などにより異なります。
- カブレを生じている場合はうまく接着しませんので、この場合医師に相談し、カブレを治癒してからご使用ください。
- 万一、肌に合わない時は使用を中止し、医師または看護師にご相談ください。

## 廃棄上のご注意

使用済みのストーマ装具は、排泄物をトイレに流した後、新聞紙などに包み、ゴミ袋に入れてお捨て下さい。装具は通常「燃えないゴミ」の扱いですが、地域により異なる場合もありますので、詳しくは各自自治体へご確認ください。

## 種類と規格

品名	種類	商品コード No.	規格		1パック入数	
			穴の大きさ	ストーマ有効径 袋サイズ(縦×横)		
ラパック・スーパーG	80	12501	—	39mmまで(フリーカット)	300mm×90mm	30枚
	100	12502	—	49mmまで(フリーカット)	400mm×110mm	30枚
	125	12503	—	74mmまで(フリーカット)	400mm×135mm	30枚
ラパック・スーパーC	100	12511	30mmφ	24～49mm(フリーカット)	200mm×140mm	30枚
	125	12512	30mmφ	24～74mm(フリーカット)	250mm×150mm	30枚
ラパック・スーパーF	100	12521	—	49mmまで(フリーカット)	200mm×140mm	30枚
	125	12522	—	74mmまで(フリーカット)	260mm×160mm	30枚